

UGARI  
GERIÁTRICA



# CATÁLOGO



**GENERAL**

Fabricación e importación de productos geriátricos y para la dependencia



# ÍNDICE

## Línea Geriátrica

### Sistemas de sujeción y seguridad Pag.: 4-22

- Arnés para sillas de ruedas
- Sábanas de sujeción
- Manoplas de protección
- Protectores de barandilla
- Protectores de cadera "Suprima"
- Alfombra protección de caídas "Landing Strip"
- Dispositivo de localización "Otiom"
- Alfombras detección caídas "Caremat"
- Dispositivos de aviso "Alert-it"
- Detector posibles ataques de Epilepsia
- Cascos de protección craneal Ribcap

### Protección decúbito Pags: 23-25

- Taloneras de protección
- Coderas de protección
- Cuña para cambios posturales

### Productos consumibles Pag.: 26

- Baberos desechables

### Textil y lencería Pags: 27-42

- Empapadores incontinencia
- Baberos adulto
- Pijamas demencia
- Batas paciente
- Sábanas
- Protectores y fundas colchón
- Bata reutilizable impermeable MIP (Canadá)

### Ayudas vida diaria Pags: 43-62

- Reposabrazos universal Jumborest
- Tabla extensión mesas Mini Access
- Tabla extensión mesa Access
- Nimble-Cortador de dedo
- Gripoballs
- Cubertería adaptada Webequ
- Vajilla melamina Ornamin
- Vasos, pisteros y tapas
- Abridor de tapones
- Pisteros encamados
- Soportes de sandwich
- Tapetes antideslizantes
- Botes multiusos
- Soporte baraja
- Escurreidor de trapos
- Pinzas "una mano"
- Cuchi-Tenedor "Freehand"
- Extractor de pastillas
- Protectores de escayola estancos

### Movilidad y transferencias Pags: 63-73


- Bastones "Swing"
- Alfombrillas antideslizantes
- Discos de transferencia
- Tabla de transferencias "Buffalo"
- Sábanas multideslizantes "Ergomove"
- Entrenador de marcha
- Grúas de elevación y bipedestación
- Cinchas para grúas

### Higiene y baño Pags: 74-75


- Contenedor de pañales Sangenic

## ARNESES PARA SILLA DE RUEDAS

Arnés abdominal para silla de ruedas

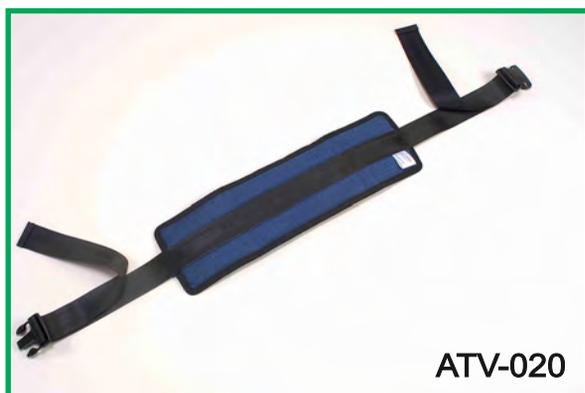


Arnés pélvico para silla de ruedas

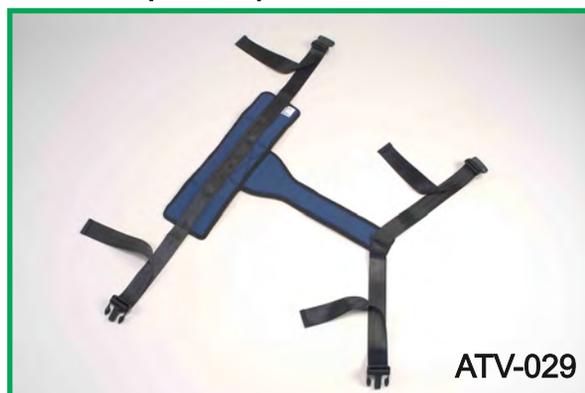


Arnés de tronco para silla de ruedas



Arnés completo para silla de ruedas

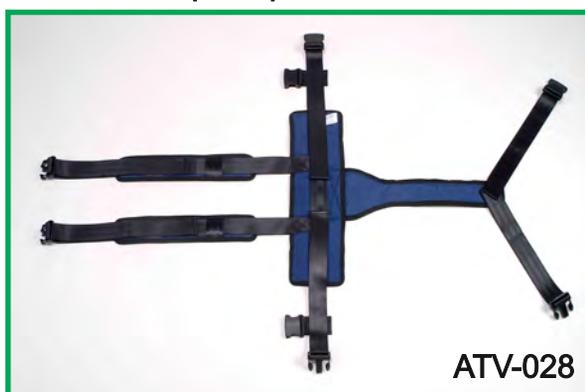

Arnés para transferencias

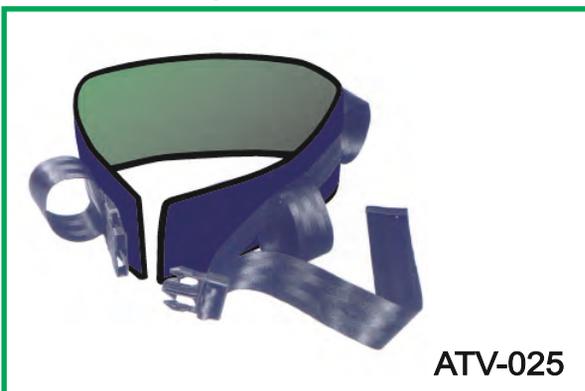

Arnés de manos (par) para silla de ruedas



Arnés de pies para cama



# ARNESES PARA SILLA DE RUEDAS

## Características comunes:

- Exterior nylon cordura.
- Interior antelina.
- Acolchados.
- Cintas poliéster alta resistencia.
- Cierres de tridente, ajustables.

## Lavado:

 Lavar a máquina 90°  Admiten lejía

 Secadora

## Arnés de tronco y completo (Ref: ATV-024, ATV-028)

- Hombreras acolchadas deslizantes.

## Arnés para transferencias (ATV-025)

- Diseñado para ayudar a realizar transferencias entre sillas, butacas, W.C., etc...
- También para ayudar al paciente a levantarse y a caminar, especialmente en rehabilitación.
- Usado en combinación con el Disco para transferencias (Ref. IM-99836-GT), convierte cualquier transferencia en una operación sencilla y con el mínimo esfuerzo para el personal auxiliar.
- Precauciones: Ajustar el arnés con la suficiente presión para una sujeción segura, pero sin causar daño o incomodidad al paciente. Agarrar las asas con las manos, no introducirlas en ellas. Asegurarse de que las asas queden equidistantes del centro.
- NO USAR el arnés con pacientes que no puedan soportar al menos una gran parte de su peso corporal. En estos casos se debería usar una grúa.
- Tallas: S: 56 a 80 cm cintura  
M: 75 a 115 cm cintura  
L: 105 a 140 cm cintura

## Arnés de manos y pies (Ref: ATV-021, ATV-022)

- Cierre por doble velcro opuesto, sin llaves ni imanes.

## SÁBANA DE SUJECIÓN



- Impide al paciente levantarse o caerse de la cama, así como manipular los empapadores, sondas etc.
- Permite sentarse en la cama, girarse y mover libremente brazos y piernas.
- Fabricada en tejido semielástico 50% algodón, 50% poliéster, para soportar tirones sin rasgarse.
- Cremallera reforzada con cierre en los pies y tope superior protegido del contacto con la piel.
- Goma de ajuste de tensión fuerte que sujeta la sábana bajo el colchón aprovechando el propio peso del paciente.
- Aperturas laterales para permitir el uso de sondas vesicales y tubos de colchones de aire.

### Lavado:

 Lavar a máquina 60°  No lejía

 Secadora  Planchado a temperatura suave

### Referencias:

**ATV-070-090/105/120:** Modelo **NORMAL**/ anchos de cama

**ATV-071-090/105/120:** Modelo especial para pacientes **OBESOS**

**ATV-072-090/105/120:** **REFORZADA**, con tejido extra resistente

**ATV-075-090/105/120:** Modelo con **MANGAS LARGAS**

**ATV-077-090/105/120:** Modelo con **CREMALLERA EN LOS HOMBROS** para facilitar su colocación en pacientes con rigidez en brazos/codos/hombros

**ATENCIÓN: lavar del revés y con la cremallera cerrada.**

# MANOPLA DE PROTECCIÓN



- Evita que el paciente se autolesione y/o manipule pañales, sondas, catéteres, etc.
- Tejido exterior en algodón 100%, 1ª calidad, no alérgico, transpirable.
- Guata interior de fibras de poliéster ligadas entre sí y siliconadas, lo que evita el desplazamiento o apelotonamiento de las mismas.
- Máximo volumen en la palma de la mano, mínimo en el dorso.
- Pre-envejecimiento, sin pérdida de volumen, esponjosidad prácticamente inalterable, tacto similar a la pluma.
- Hidrófuga, evita la oxidación o moho después del lavado y seca rápidamente.
- Lavable hasta 90°C.

## **Lavado:**


90° Lavar a máquina 90°     No lejía

Secadora

## **Referencia:**

**ATV-012:** Manopla de protección (par)

## PROTECTOR DE BARANDILLA “Barandilla completa y media barandilla”

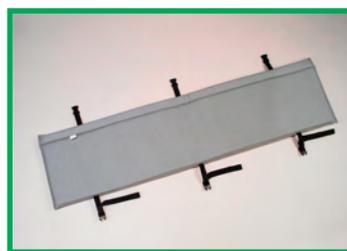

### **Descripción:**

- Protector acolchado para barandillas de cama.
- Protege al paciente de golpes contra la barandilla e impide introducir los brazos y piernas entre las barras de las mismas.
- Costura a 60 mm del borde superior para doblar el protector sobre la barra superior de la barandilla.

### **Material:**

- Foam de alta densidad.
- Tapicería IGNÍFUGA (M-2).
- Lavable con paño húmedo.
- Sujeción por cintas con cierres de tridente ajustables.  
(3 cintas para el protector de barandilla completa y 2 cintas el protector de media barandilla)

### **Medidas protectores de barandilla completa:**

- Largo: 1530 mm
- Ancho: 380 mm
- Grosor: 30 mm

### **Medidas protectores de media barandilla:**

- Largo: 900 mm
- Ancho: 380 mm
- Grosor: 30 mm

### **Referencias:**

**ATV-031:** Protector de barandilla beige  
**ATV-030:** Protector de barandilla gris  
**ATV-031S:** Protector de media barandilla beige  
**ATV-030S:** Protector de media barandilla gris

# PROTECTORES DE CADERA "SUPRIMA"



## Descripción:

- Los protectores de cadera Suprima ofrecen una efectiva protección contra fracturas y lesiones en caso de caídas.
- Están colocados de tal manera que protegen la articulación (unión) de la cadera.
- Los protectores están fabricados con espuma viscoelástica por lo que se adaptan y se vuelven más suaves con el calor corporal.
- Son cómodos y discretos, nada voluminosos.
- La ropa interior del protector de cadera está tejido sin costuras y es duradero.
- Debido a su ligera compresión, proporciona un ajuste perfecto y seguro. La banda elástica de sujeción es ancha y muy cómoda.
- Funcional y cómodo: el protector de cadera ofrece al usuario el más alto nivel de protección tanto cuando está activo como cuando está acostado.
- En caso de una caída, el golpe se absorbe y minimiza el riesgo de fracturas. El protector reduce la energía de impacto en el cuello del fémur y la distribuye a los tejidos blandos circundantes.

## Usuarios

- Indicado para personas con osteoporosis, con antecedentes de caídas, personas que sufren debilidad muscular, pérdidas de equilibrio o vértigos.
- También está indicado para personas que realizan tareas domésticas y corren riesgo de caídas por tropezos con alfombras, escalones o suelos mojados
- Personas que toman medicamentos, sobre todo tranquilizantes y medicamentos para dormir o que reducen la presión arterial y el azúcar en sangre.

## Medidas hombre y mujer

	S		M		L		XL		XXL	
Talla (mujer)	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Talla (hombre)	4		5		6		7		8	
Circunferencia cadera (cm.)	90-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-116	117-121	122-126	127-132

## Composición e instrucciones de lavado

Material	58% algodón, 36% poliamida, 6% elastano
Tallas	Unisex (mujer y hombre): S-XXL
Instrucciones de lavado	60°     No utilizar suavizante
Color	Blanco

## Referencias:

- 1492:** Protector de cadera Suprima. 1 pieza ropa interior + protector de cadera extraíble (S, M, L, XL, XXL)  
**1494:** Protector de cadera Suprima. 2 piezas ropa interior + protector de cadera extraíble (S, M, L, XL, XXL)  
**1481:** Protector de cadera Suprima. 1 pieza ropa interior + protector de cadera integrado (S, M, L, XL, XXL)

## ALFOMBRA PROTECCIÓN DE CAÍDAS “LANDING STRIP”



### **Descripción:**

- LandingStrip es una solución efectiva y extremadamente compacta para reducir el riesgo de lesiones si un paciente o residente tiene riesgo de caerse de la cama. Fabricada en vinilo de alta resistencia al desgaste. Absorbe la energía del impacto con 6 veces más eficacia que una colchoneta de 6 cm de grosor.
- La efectividad radica en el núcleo de LandingStrip, que consiste en una serie de espumas unidas de varias densidades que absorben y disipan con efectividad la energía de la caída, creando un efecto “Airbag”.
- La capacidad de absorción de la alfombra es tan elevada, que es capaz de mantener intacto un huevo que cae desde 3 metros de altura **con tan solo 1 cm de grosor**.
- Landing Strip no necesita ser retirado o almacenado y su firmeza hace que no sea un obstáculo para el paso de usuarios y cuidadores, a pie, con andador, sillas de ruedas o grúas.
- Los bordes biselados en los extremos se inclinan hasta el nivel del suelo por lo que LandingStrip no es un obstáculo para el paciente o el cuidador y puede permanecer al lado de la cama durante 24 horas.
- Fácil de limpiar y desinfectable con una disolución de lejía. Impermeable al polvo a los fluidos y a los microorganismos.
- Sus medidas permiten en algunos casos usar una única alfombra para dos usuarios al mismo tiempo.
- Superficie inferior antideslizante.

### **Beneficios:**

- Reduce el riesgo de lesiones que pueden producirse al caerse de la cama.
- Reduce la carga de trabajo y ahorra tiempo al personal porque no necesita manipulación ni almacenaje.

### **Referencias:**

**LS36GRIJS:** Alfombra protección de caídas “Landing Strip” 178x92 cm

UGARI GERIÁTRICA

C/Venta de la Estrella 6, pab.126 - 01006 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)  
Tel (+34) 945 146 744; Fax (+34) 945 154 036; E-mail: ugari@ugari.es

[www.ugari.es](http://www.ugari.es)

# DISPOSITIVO DE LOCALIZACIÓN OTIOM



OTIOM cuida de las personas con demencia para que no se pierdan.

Y en caso de que salgan y se desorienten, Otiom las puede encontrar rápidamente y de forma segura.

- Otiom es una ficha de pequeño tamaño, sencilla y robusta que pueden llevar puesta las personas con demencia. Se puede colocar como colgante, meter en un bolsillo, colocar de llavero o incluso coserlas dentro de un bolsillo para que el usuario no se la quite y o no se pierdan.



- Cuando el usuario sale de casa o de la zona de seguridad previamente definida por el cuidador, Otiom se pone en marcha inmediatamente y comienza a realizar el rastreo GPS del usuario que se ha desorientado.
- Teniendo la app de Otiom instalada en el teléfono, este recibe inmediatamente una notificación, informando que el usuario está fuera de casa o de la zona segura asignada.
- Una zona o lugar seguro puede ser, por ejemplo, su casa y el jardín, la calle donde vive o donde se va a dar un paseo y con la APP de Otiom se puede asignar de forma sencilla e intuitiva.
- Entre carga y carga puede pasar hasta un mes.
- Otiom tiene seis niveles de seguridad diferentes, que se controlan también desde la app de Otiom. Con estos seis niveles, la persona con demencia, sus familiares o el personal sociosanitario pueden encontrar el nivel más adecuado para el usuario.

## Principales ventajas

- Otiom **localiza** a los residentes tanto **fuera de la residencia como dentro** de la misma.
- **Se pueden establecer perímetros de seguridad** por los cuales los usuarios pueden deambular sin necesidad de generar ninguna alarma. Son fácilmente configurables y pueden ser del tamaño que se quiera (por ejemplo, el jardín de la residencia o un barrio).
- **Otiom es respetuoso con los usuarios**. No los monitoriza ni localiza mientras estén dentro de los límites de seguridad establecidos.
- Puede haber **uno o múltiples responsables** que reciben las alarmas dependiendo del nivel de seguridad asignado.
- **Carga inalámbrica**.



# ALFOMBRA DETECCIÓN CAÍDAS CAREMAT



## Aplicaciones:

Supervisión y atención de personas con demencia, riesgo de caídas o desorientación, especialmente indicado tanto en atención domiciliaria como residencial.

## Componentes:

Alfombra Caremat con sensores de presión.

Emisor y receptor inalámbrico Libra+. (opcional)

## Prestaciones:

- Seguridad y tranquilidad en el entorno familiar.
- Receptor móvil: se puede colocar en cualquier lugar de casa y trasladar en cualquier momento, sin instalación.
- Idóneo para casas con jardín (alcance máximo 200 m).
- El emisor es también pulsador: puede ser utilizado como timbre de llamada con solo dejarlo al alcance del paciente.
- Aviso sonoro, luminoso (flash) o ambos. Ideal para aviso silencioso y para personas con problemas auditivos.
- Timbre con sonido polifónico.
- Volumen ajustable.
- Duración aproximada de las pilas (5 usos/día).  
Receptor: 12 meses.  
Emisor: 18 meses.
- Garantía, 2 años.
- Cada receptor puede recibir el aviso de 4 y 6 alfombras diferentes con identificación para cada una.
- Puede conectarse al sistema de llamada existente en la residencia u hospital.
- Se puede interconectar con los sistemas Alert-it. (ver página 10)

## Referencias:

**A01C:** Alfombra Caremat 1100x700x9 mm

**B01C:** Alfombra Caremat 700x400x9 mm

**C01C:** Alfomabra Caremat 1100x700x9 mm (media luna)

**DC917SGL:** Kit emisor/receptor Chime serie 9 (controla 6 emisores)

**DC515SGL:** Kit emisor/receptor Chime Serie 5 (controla 4 emisores)


**DCP511:** Emisor adicional instalado en alfombra

**DCP511:** Emisor adicional



## DISPOSITIVOS DE AVISO "ALERT-IT"

### Sensores para cama

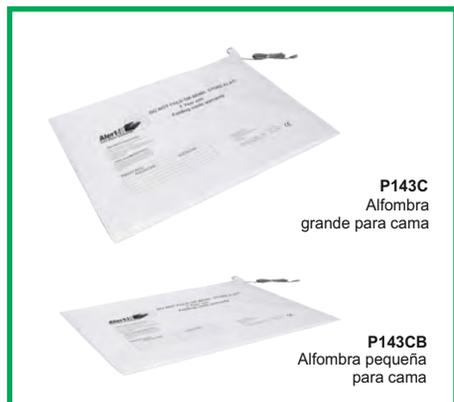

Las alfombras para detección de presencia Alert-it detectan el peso del usuario cuando está tumbado en la cama.

Las alfombras se colocan **sobre el colchón**, preferiblemente debajo de una sábana para mayor confort del usuario.

Su diseño fino y flexible proporciona la máxima comodidad.

Las alfombras son compatibles con el sistema de alarmas Alert-it y con la mayoría de sistemas de alarma de las residencias.

Disponible en dos medidas, **760 x 250 x 3 mm** y **740 x 500 x 3 mm**

Las alfombras cuentan con protección IP64 por lo que soportan cualquier tipo de incontinencia.



La tiras-sensor para detección de presencia Alert-it, detectan el peso del usuario cuando está tumbado en la cama.

Se coloca debajo del colchón y se puede fijar con bridas a las lamas del somier.

Las tiras-sensor son compatibles con el sistema de alarmas Alert-it y con la mayoría de sistemas de alarma de las residencias.

La medida de la tira sensor es de **80 cm**.

El monitor P163 recibe la señal de los sensores y es el encargado de enviar la señal de forma inalámbrica al receptor



El monitor P180A recibe la señal de los sensores y emite un sonido para avisar al asistente



## DISPOSITIVOS DE AVISO "ALERT-IT"

### Sensores para silla



La alfombra para silla ALERT-IT, es una alfombra que es capaz de detectar cuando el usuario se levanta del asiento. La alfombra puede colocarse directamente sobre la silla o bien debajo de un cojín.

Las alfombras son compatibles con el sistema de alarmas Alert-it y con la mayoría de sistemas de alarma de las residencias.

Las alfombras cuentan con protección IP64 por lo que soportan cualquier tipo de incontinencia.

Medidas **380 x 250 x 3 mm**



La tira-sensor para silla ALERT-IT monitoriza al usuario mientras está sentado y detecta cuando éste se levanta. Se coloca debajo del cojín.

Las tiras-sensor son compatibles con el sistema de alarmas Alert-it y con la mayoría de sistemas de alarma de las residencias.

Medidas **400 x 15 x 10 mm**

El monitor P163 recibe la señal de los sensores y es el encargado de enviar la señal de forma inalámbrica al receptor



El monitor P180A recibe la señal de los sensores y emite un sonido para avisar al asistente



## DISPOSITIVOS DE AVISO "ALERT-IT"

### Alfombra detección de caídas



La alfombra para suelo ALERT-IT detecta cuando el usuario se levanta de la cama y pisa la alfombra. Se coloca en un lateral de la cama.

Medidas **910 x 610 x 5.5 mm**



La alfombra para suelo ALERT-IT detecta cuando el usuario se levanta de la cama y pisa la alfombra. Se coloca en un lateral de la cama. El material de la superficie es de tipo moqueta antideslizante.

Medidas **870 x 580 x 9 mm**

El monitor P163 recibe la señal de los sensores y es el encargado de enviar la señal de forma inalámbrica al receptor

Alfombras detección de caídas



Conexión por cable



Monitor P163

Conexión inalámbrica



Receptor

El monitor P180A recibe la señal de los sensores y emite un sonido para avisar al asistente

Alfombras detección de caídas



Conexión por cable



Monitor P180A

## DISPOSITIVOS DE AVISO "ALERT-IT"

Sistemas de seguridad auxiliares



### DETECTOR DE PRESENCIA

El detector de presencia ALERT-IT permite monitorizar a los pacientes de una habitación, detectando si alguno de ellos se ha movido. Puede colocarse en diferentes lugares de la habitación (pared, a ras de suelo, etc.), de tal manera que es posible configurar el dispositivo para que detecte diferentes tipos de movimientos.



### PULSADORES AVISO Y ANTICAÍDA

Los pulsadores ALERT-IT permiten al usuario enviar una señal de aviso al cuidador simplemente apretando el pulsador. En el caso del modelo anticáida, además de la función de aviso, el pulsador es capaz de detectar si el usuario se ha caído y de mandar en ese caso una señal de aviso al cuidador.



### SENSOR AVISADOR PARA PUERTA

El sensor avisador para puerta permite detectar cuándo un paciente está intentando salir de su habitación. Una vez abierta la puerta, el sensor envía una señal al receptor del cuidador para que éste acuda.



## DISPOSITIVOS DE AVISO "ALERT-IT"

**NUEVO**



### Pulsador de llamada con cable

El pulsador de llamada Alert-it, permite al usuario enviar una señal de aviso al personal sanitario, simplemente pulsado el botón de llamada, el monitor recibe la señal y la envía al receptor portátil que lleva el cuidador.

El pulsador de llamada tiene un cable extensible para poder acercarlo al usuario y facilitar su alcance.

El monitor P163 recibe la señal del pulsador de llamada y es el encargado de enviar la señal de forma inalámbrica al receptor



### Pulsador de llamada pared

El pulsador de llamada P161-C5 es un pulsador que se puede colocar en la pared o en la mesilla del usuario y simplemente pulsando el botón de llamada envía una señal inalámbrica via radio al receptor que tiene el cuidador.

Los sensores auxiliares se conectan directamente con el receptor





## DETECTOR POSIBLES ATAQUES EPILEPSIA COMPANION

- El Companion mini es el sistema más pequeño, avanzado y sensible que puede detectar movimientos sospechosos de ser ataque epiléptico, discriminando los movimientos habituales en la cama. Es muy resistente, e inalámbrico por lo tanto no necesita ningún tipo de cable.
- Se coloca debajo del colchón.
- Adecuado para niños y adultos.
- Diseñado para detectar movimientos asociados a convulsiones tónicas clónicas.
- El Companion está catalogado como producto sanitario.

### Companion Mini



El Companion Mini domiciliario se vende en conjunto con el receptor Plesio Pager para entornos domiciliarios. El Companion Mini detecta la posible actividad convulsiva, en los ataques de epilepsia y envía una señal vía radio al receptor.

El Companion Mini y el receptor se comunican cada 8 segundos verificando que el funcionamiento es correcto, que las baterías tienen carga y que la distancia entre ambos no excede la cobertura.

#### Funciones principales:

- Proporciona tranquilidad a los cuidadores de personas que sufren ataques de epilepsia tónico-clónicos.
- Fácil configuración y uso.
- La duración aproximada de la batería es de 1 año.
- 3 años de garantía.
- La distancia entre el receptor y el Companion puede ser de hasta 450 metros.
- Tecnología totalmente inalámbrica (no tiene ningún cable)

#### Referencia:

**S1043B:** Companion Mini + Receptor domiciliario (Plesio Pager)

### Companion Mini Pro



El Companion Mini Pro detecta la posible actividad convulsiva, en los ataques de epilepsia y envía una señal vía radio al receptor. El Companion Mini Pro es la mejor opción para las residencias y hospitales y se combina con los receptores para entornos profesionales P137 de Alert-it. El Companion Mini Pro se suministra con dispositivo de reseteo que se coloca en la habitación para resetear la alarma. Esto hace necesario que el Companion Mini Pro deba ser reseteado por el cuidador, preservando el deber de asistencia.

#### Funciones principales:

- Diseñado para ser utilizado en instalaciones sanitarias profesionales.
- Funciona con los receptores profesionales Alert-it P137 de 8 o 64 canales.
- Cancelación de la alarma con el dispositivo de reseteo (acuse de recibo).
- Tecnología totalmente inalámbrica (no tiene ningún cable).
- La duración aproximada de la batería es de 1 año.

#### Referencia:

**R1043BB:** Companion Mini PRO (companion + reset) (No incluye receptor)



## DETECTOR POSIBLES ATAQUES EPILEPSIA PULSE COMPANION

- El Pulse Companion es un dispositivo de detección de variaciones de la frecuencia cardíaca asociadas a posibles ataques epilépticos.
- El pulse Companion controla la frecuencia cardíaca y detecta cuando las pulsaciones exceden del rango de los límites establecidos mediante la aplicación de móvil gratuita de Alert-it.
- La subida o bajada de las pulsaciones pueden indicar una convulsión. En cuanto el brazalete detecte esa oscilación, se enviará una señal al receptor que lleva el cuidador, avisándole de una posible convulsión del usuario.
- La alarma es fuerte y continua, diseñada para advertir rápidamente a los cuidadores.
- La única forma de detener y restablecer la alarma es resetear el aviso en Pulse Companion, obligando al cuidador a acercarse a la habitación del usuario para resetear la alarma.



- Para mayor seguridad, el Pulse Companion y el receptor se envían señales de radio constantemente. Se conectan y actualizan cada ocho segundos. Si el receptor está fuera del rango de 450 m, o si el Pulse Companion o el brazalete de detección de la frecuencia cardíaca falla o están apagados, se activará una señal de alarma en el receptor. Por lo tanto, siempre tendrá la tranquilidad de saber que si algo no funciona bien en el dispositivo, este le dará una señal de alarma.



- El dispositivo es ideal para los padres que necesitan ser alertados si su hijo tiene una convulsión durante la noche.
- También es ideal para entornos profesionales, incluidos los centros residenciales y hospitales.
- El receptor puede monitorizar hasta 64 dispositivos. Esto significa que el Pulse Companion se puede usar junto con otros dispositivos, por ejemplo, los sensores de movimiento, alfombras de cama, de suelo o los sistemas Companion Mini o Mini Pro de Alert-it.
- En situaciones en las que un cuidador es responsable de más de un paciente, es posible conectar varios Pulse Companion a un solo receptor.
- Los umbrales de frecuencia cardíaca se pueden personalizar individualmente tanto para adultos como para niños mediante la App gratuita de Alert-it, muy sencilla y fácil de configurar. Con ella se pueden verificar las lecturas y cambiar los rangos a partir de los cuales se envía la señal de alarma.



- El brazalete para controlar las pulsaciones es muy cómoda, portátil y la batería recargable dura entre 12 y 16 horas.
- El brazalete es de color negro.
- Se puede conectar a la central de llamadas de la residencia utilizando el dispositivo de Alert it. llamado Connect.it.


### Referencia:

**R1047A:** Pulse Companion (Monitor + Brazalete) (No incluye receptor)

# CASCOS DE PROTECCIÓN CRANEAL "RIBCAP"

## Características comunes de los Ribcaps:

- Los cascos de protección craneal o "Ribcaps" protegen al usuario al mismo tiempo que conservan una estética moderna y actual.
- Ribcap reemplaza los cascos, incómodos e estigmatizantes.
- Están especialmente diseñados para personas con **epilepsia**, **autismo** o cualquier otra disfunción en la que el usuario pueda caerse o dañarse la cabeza. También protegen al usuario de arañazos y abrasiones.
- Combina el **material de absorción de impactos Schoeller E1** con una capa **Coolmax**, que **permite la transpiración** y la regulación de la temperatura proporcionando la máxima comodidad al usuario.
- Se puede usar diariamente, ya que es cómodo, ligero y elegante.
- Se pueden lavar y plegar para facilitar el almacenamiento. Secado rápido.
- También tiene correas ajustables, que se pueden retirar para ajustarlo a la cabeza.

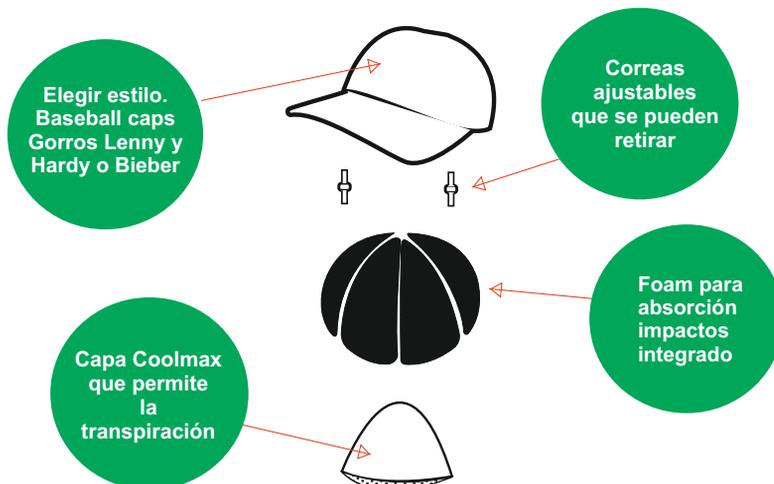

## Características técnicas:



# CASCOS DE PROTECCIÓN CRANEAL "RIBCAP"

## Fox

- Gorro para absorción de impactos para interior y exterior. Diseño actual y moderno. Incluye una capa **Coolmax** que permite una gran transpiración lo que le hace ideal para su uso en climas cálidos. Es totalmente **impermeable**.

### Características técnicas:

<b>Material:</b>	Exterior	24% poliéster 59% poliamida/nylon 17% elastano (licra)
	Interior	78% poliéster 22% elastano (licra)

**Tamaño: Adulto**  
 Ø 53-55 cm S  
 Ø 56-58 cm M  
 Ø 59-61 cm L



Negro

Modelo Fox		
S	FOXBL/S Negro	
M	FOXBL/M Negro	
L	FOXBL/L Negro	

## Hardy

- Gorro para absorción de impactos interior y exterior. Diseño actual y moderno. Incluye una capa **Coolmax** que permite una gran transpiración lo que le hace ideal para su uso en climas cálidos.

### Características técnicas:

<b>Material:</b>	Exterior	58% algodón 34% poliamida/nylon 8% elastano
	Interior	82% poliéster 18% elastano

**Tamaño: Adulto**  
 Ø 53-55 cm S  
 Ø 56-58 cm M  
 Ø 59-61 cm L



Arena

Platino

Modelo Hardy		
S	HASA/S Arena	HAPL/S Platino
M	HASA/M Arena	HAPL/M Platino
L	HASA/L Arena	HAPL/L Platino

UGARI GERIÁTRICA

C/Venta de la Estrella 6, pab.126 - 01006 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)  
 Tel (+34) 945 146 744; Fax (+34) 945 154 036; E-mail: ugari@ugari.es

www.ugari.es

# CASCOS DE PROTECCIÓN CRANEAL RIBCAP

## Baseball cap

Gorra para absorción de impactos, con un diseño actual y moderno. Incluye una capa **Coolmax** que permite una gran transpiración lo que le hace ideal para su uso en climas cálidos. Es totalmente **impermeable**.

El modelo azul para niños tiene un protector extra para la parte occipital.

**Material:** 100% algodón en el interior  
82 % poliéster  
18% elastano

**Tamaño:** Ø 50-52 cm Mx/Md  
Ø 53-58 cm S/M  
Ø 59-65 cm L/XL



Modelo Baseball cap				
S/M	BAPL/SM Platino	BABL/SM Azul	BARE/SM Rojo	BABL/MxMd Azul <small>para niños con protección occipital</small>
L/XL	BAPL/LXL Gris	BABL/LXL Azul	BARE/LXL Rojo	

**NUEVO**



## Lenny

- Gorro para absorción de impactos, con un diseño actual y moderno, perfecto para su uso en exteriores. Protege del frío. Incluye una capa **Coolmax** que permite una gran transpiración.

### Características técnicas:

**Material:** Exterior 59% poliamida  
24 % poliéster  
17% elastano  
Interior 82% poliéster  
18% elastano

**Tamaño: Niño**  
Ø 47-49 cm Mini  
Ø 50-52 cm Midi  
**Adulto**  
Ø 53-55 cm S  
Ø 56-58 cm M  
Ø 59-61 cm L  
Ø 62-65 cm XL



Modelo Lenny	Adulto S	Adulto M	Adulto L	Adulto XL	Niño Mini	Niño Midi
Gris	LEGR/S Gris	LEGR/M Gris	LEGR/L Gris	LEGR/XL Gris	LEGR/Mn Gris	LEGR/Md Gris
Antracita	LEAN/S Antracita	LEAN/M Antracita	LEAN/L Antracita	LEAN/XL Antracita	LEAN/Mn Antracita	LEAN/Md Antracita



## Bieber

- Gorro de niños para absorción de impactos, con un diseño actual y moderno. Protege del frío. Incluye una capa **Coolmax** que permite una gran transpiración.

### Características técnicas:

**Material:** 50% lana  
50 % acrílico en el interior  
100% algodón (visera)

**Tamaño: Niño**  
Ø 47-49 cm Mini  
Ø 50-52 cm Midi  
Ø 53-55 cm Maxi



Modelo Bieber	Niño Mini	Niño Midi	Niño Maxi
Marrón	BIBR/Mn Marrón	BIBR/Md Marrón	BIBR/Mx Marrón



UGARI GERIÁTRICA

C/Venta de la Estrella 6, pab.126 - 01006 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)  
Tel. (+34) 945 146 744; Fax (+34) 945 154 036; E-mail: ugari@ugari.es

www.ugari.es

## TALONERA DE PROTECCIÓN



- Lavable hasta 90° C.
- Tejido exterior en algodón 100%, 1ª calidad, no alérgico, transpirable.
- Costuras situadas fuera de las zonas de apoyo, realizadas con hilo de alta resistencia.
- Guata interior de fibras de poliéster ligadas entre sí y siliconadas, lo que evita el desplazamiento o apelotonamiento de las mismas.
- Pre-envejecimiento, sin pérdida de volumen, esponjosidad prácticamente inalterable, tacto similar a la pluma.
- Hidrófuga, evita la oxidación o moho después del lavado y seca rápidamente.
- Cierres de presión: Completamente planos en su parte inferior, sujetan la talonera con la presión deseada para evitar que se mueva o afloje.

### Lavado:

 Lavar a máquina 90°  No lejía

 Secadora

### Referencia:

**ATV-013:** Talonera de protección

## CODERA DE PROTECCIÓN



- Lavable hasta 90° C.
- Tejido exterior en algodón 100%, 1ª calidad, no alérgico, transpirable.
- Costuras situadas fuera de las zonas de apoyo, realizadas con hilo de alta resistencia.
- Guata interior de fibras de poliéster ligadas entre sí y siliconadas, lo que evita el desplazamiento o apelotonamiento de las mismas.
- Pre-envejecimiento, sin pérdida de volumen, esponjosidad prácticamente inalterable, tacto similar a la pluma.
- Hidrófuga, evita la oxidación o moho después del lavado y seca rápidamente.
- Cierres de presión: Completamente planos en su parte inferior, sujetan la codera con la presión deseada para evitar que se mueva o afloje.

### **Lavado:**

 Lavar a máquina 90°     No lejía

 Secadora

### **Referencia:**

**ATV-011:** Codera de protección

## CUÑA PARA CAMBIOS POSTURALES



- Interior en foam de alta densidad.
- Funda de poliuretano impermeable y anti-deslizante. Desenfundable y lavable a 90° C.
- Dos grados diferentes de inclinación.
- Asa para transporte.
- Medidas: Longitud: 53 cm  
Altura: 20 cm  
Laterales: 26 cm y 22 cm  
Base: 29 cm
- Si se utilizan empapadores textiles, se recomienda colocar la cuña debajo de los mismos.

### Referencia:

**IM53:** Cuña para cambios posturales

## BABERO DESECHABLE

### Descripción:

- Babero desechable para adultos de 37x70 cm con bolsillo.
- Compuesto por una fina capa de tejido procedente de fibras recicladas y una capa de polietileno blanco, sin blanqueantes clorados.
- Densidad tejido: 20 gr/m2  
PE: Blanco crudo  
Espesor: 11 micras

### Reciclaje:

- El reciclado del tejido se puede realizar después de la separación del polietileno. La destrucción mediante incinerado no crea polución.



### Referencias:


- **60092:** Babero desechable con bolsillo (pack 100 uds.)  
(cajas de 9 packs)

### Certificados:

Certificado con las normas ISO 9001:2008 y el ISO 14001:2004.  
Certificado CE de acuerdo a la normativa MDD 93/42/EEC.

# EMPAPADOR CHAMONIX

Secante y superabsorbente

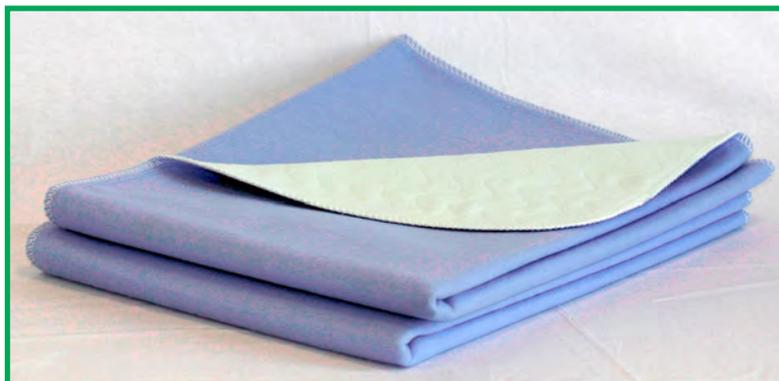

## Descripción:

- Empapador lavable con la parte superior de terciopelo de poliéster color verde claro y la parte inferior de poliuretano color azul. 3 capas de material "laminadas".
- Gran absorción y capacidad secante y excepcionalmente ligero ¡solo 505 gr con alas!
- Secado rápido. Mínimo volumen. Bordes tipo "remallado" con 2 pinzas/4 hilos.
- Antideslizante. TRANSPIRABLE.
- Esterilizable en autoclave (121° C).

**Capacidad de absorción:** Aproximadamente 1.200 ml.

## Composición:

1ª capa (superior): Terciopelo secante (poliéster 100% "Hydrex") color verde claro (170 gr/m2) entretejido con la capa absorbente.

2ª capa (interior): "Triton" mezcla de poliéster 65% y viscosa 35%. Super absorbente (235 gr/m2).

3ª capa (barrera): Película impermeable y transpirable de poliuretano entretejido con poliéster "cepillado" (150 gr/m2).

Alas: Algodón 25%/poliéster 75% tejido (105 gr/m2). 50x90 cm.

Hilo: Poliéster 100% alta resistencia (Poliéster 60 TEX).

## Lavado:

Lavado: Pre-lavado suave antes de usar. No utilizar suavizante. El suavizante reduce la capacidad de absorción.

75° LEJÍA: Máximo 1.400 ml. al 1% por 45 kg de carga. Se recomienda el uso de blanqueadores oxigenados. Temperatura máxima de lavado: 75° C.

Secado: Temperatura máxima de secado: 75° C. Recomendable que quede en el producto un 3-5% de humedad.



Después de secado, se recomienda el uso de aire frío y seguidamente plegar y almacenar.

## Referencias:

**9026:** Empapador con barrera de poliuretano 85x90 cm (ancho x largo cama), sin alas

**9026/FS:** Empapador con barrera de poliuretano 85x90 cm (ancho x largo cama) con alas, (alas 50x90 cm).

**BO3346:** Bolsa empapador transparente de 33x46 cm opcional.

## Garantía:

MED-I-PANT, Inc. Quebec-Canadá, certifica que todos los materiales utilizados en la fabricación de este producto son exclusivamente de primera calidad. Este producto está garantizado frente a cualquier defecto de material o de fabricación. La duración y las prestaciones de este producto están subordinadas al cumplimiento de las instrucciones de lavado.

UGARI GERIÁTRICA

C/Venta de la Estrella 6, pab.126 - 01006 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)  
Tel (+34) 945 146 744; Fax (+34) 945 154 036; E-mail: ugari@ugari.es

[www.ugari.es](http://www.ugari.es)

# EMPAPADOR SONOMA



## Descripción:

- Empapador lavable con la capa superior de terciopelo de poliéster de color blanco y la capa inferior de poliuretano de color azul. Impermeable, transpirable y antideslizante.
- Esterilizable en autoclave (121°C).
- Mínimo volumen: 3 capas de material laminadas.
- Gran capacidad de absorción, súper-secante y excepcionalmente ligero: ¡397 gr!
- Secado rápido.
- Bordes remallados con 2 pinzas / 4 hilos.
- Duración mínima: 300 lavados (respetando instrucciones de lavado).

## Composición:

- Capa superior: Terciopelo de poliéster “cepillado” 100 % color blanco (75 gr/m<sup>2</sup>), cosida a la capa absorbente. Hidrófuga, súper-secante: conduce la humedad a la capa absorbente manteniendo seco al paciente. Súper-suave: el cepillado del poliéster evita cualquier efecto abrasivo sobre la piel.
- Capa intermedia: Absorbente, tejido sin tejer 65 % poliéster/35 % rayon (235 gr/m<sup>2</sup>).
- Capa inferior: Tejido de poliéster con película de poliuretano de 2mm de espesor, (150 gr/m<sup>2</sup>). Impermeable y transpirable.
- Alas: Antideslizante: se mantiene en su sitio y no hace arrugas peligrosas para la piel. 75 % poliéster/ 25 % algodón, (109 gr/m<sup>2</sup>). 75x50 cm para una adecuada sujeción bajo el colchón.
- Hilo: Poliéster 100 % alta resistencia (60 TEX).

## Instrucciones de lavado:

Este producto es apto para lavado y secado, tanto industrial como doméstico.  
La capacidad de absorción óptima se obtiene después de un primer lavado.

Lavado: Pre-lavado suave antes de usar. Temperatura máxima: 75 °C

75°

No utilizar suavizante: el suavizante reduce la capacidad de absorción.

Lejía: máximo 1.400 ml. al 1 % por 45 kg de carga. Se recomienda el uso de blanqueadores oxigenados.

Secado: Temperatura máxima 75 °C Recomendable que quede en el producto un 3-5 % de humedad.



Después de secado se recomienda el uso de aire frío y seguidamente plegar y almacenar.

## Referencias:

**11025/QF** : Empapador SONOMA 90x75 cm (ancho x largo cama) con alas (alas:75x50 cm)

**BO3346**: Bolsa empapador transparente de 33x46 cm opcional.

## Garantía:

MED-I-PANT, Inc. Québec (Canadá) certifica que todos los materiales empleados en la fabricación de este producto son exclusivamente de primera calidad. La duración y las prestaciones de este producto están subordinadas al cumplimiento de las instrucciones de lavado. Este producto está garantizado frente a cualquier defecto de material o de fabricación.

UGARI GERIÁTRICA

C/Venta de la Estrella 6, pab.126 - 01006 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)

Tel (+34) 945 146 744; Fax (+34) 945 154 036; E-mail: ugari@ugari.es

[www.ugari.es](http://www.ugari.es)

## EMPAPADOR ESTÁNDAR 4 CAPAS



### **Descripción:**

- Empapador lavable con la parte superior de 80% algodón y 20% poliéster, color blanco. 4 capas de materiales.
- Bordes tipo "remallado" con 2 pinzas / 4 hilos.
- Peso: 640 gr (745 gr con alas).

**Capacidad de absorción:** Aproximadamente 1.500 ml.

### **Composición:**

1ª capa (superior): 80% algodón y 20% poliéster, color blanco (209 gr/m<sup>2</sup>).  
2ª capa (interior): Poliéster 100%, no absorbente (68 gr/m<sup>2</sup>).  
3ª capa (interior): Capa absorbente. 65% poliéster y 35% viscosa (237 gr/m<sup>2</sup>).  
4ª capa (barrera) Película impermeable de vinilo azul entretejido con poliéster (85 gr/m<sup>2</sup>) Antideslizante.  
Alas: Algodón 35%/poliéster 65% tejido (105 gr/m<sup>2</sup>), 50x90 cm.  
Hilo: Poliéster 100% alta resistencia (Poliéster 60 TEX).

### **Lavado:**

Lavado: Pre-lavado suave antes de usar. No utilizar suavizante. El suavizante reduce la capacidad de absorción.  
 LEJÍA: Máximo 1.400 ml. al 1% por 45 kg de carga. Se recomienda el uso de blanqueadores oxigenados.  
Temperatura máxima de lavado: 75° C.

Secado: Temperatura máxima de secado: 75° C. Recomendable que quede en el producto un 3-5% de humedad.  
 Después de secado, se recomienda el uso de aire frío y seguidamente plegar y almacenar.

### **Referencias:**

**516/QP/BL/F:** Empapador 85x90 cm (ancho x largo cama) con alas (alas 50x90 cm)  
**BO3346:** Bolsa empapador transparente de 33x46 cm opcional.

### **Garantía:**

MED-I-PANT, Inc. Quebec-Canadá, certifica que todos los materiales utilizados en la fabricación de este producto son exclusivamente de primera calidad. Este producto está garantizado frente a cualquier defecto de material o de fabricación. La duración y las prestaciones de este producto están subordinadas al cumplimiento de las instrucciones de lavado.

## EMPAPADOR ESTÁNDAR 3 CAPAS



### Descripción:

- Empapador lavable con la parte superior de 80% algodón y 20% poliéster, color blanco. 3 capas de materiales.
- Bordes tipo "remallado" con 2 pinzas/4 hilos.
- Peso: 545 gr (650 gr con alas).

**Capacidad de absorción:** Aproximadamente 1.500 ml.

### Composición:

1ª capa (superior): 80% algodón y 20% poliéster, color blanco (184 gr/m<sup>2</sup>).  
2ª capa (interior): Capa absorbente. 65% poliéster y 35% viscosa (235 gr/m<sup>2</sup>).  
3ª capa (barrera): Película impermeable de vinilo azul entretejido con poliéster (265 gr/m<sup>2</sup>) Antideslizante.  
Alas: Algodón 35%/poliéster 65% tejido (105 gr/m<sup>2</sup>), 50 x 90 cm  
Hilo: Poliéster 100% alta resistencia (Poliéster 60 TEX).

### Lavado:

Lavado: Pre-lavado suave antes de usar. No utilizar suavizante. El suavizante reduce la capacidad de absorción.

 LEJÍA: Máximo 1.400 ml. al 1% por 45 kg de carga. Se recomienda el uso de blanqueadores oxigenados.  
Temperatura máxima de lavado: 75° C.

Secado: Temperatura máxima de secado: 75° C. Recomendable que quede en el producto un 3-5% de humedad.

 Después de secado, se recomienda el uso de aire frío y seguidamente plegar y almacenar.

### Referencias:

**500/Q/B:** Empapador 85x90 cm, (ancho x largo cama) sin alas  
**500/QFS/BL:** Empapador 85x90 cm,(ancho x largo cama) con alas (alas 50x90 cm)  
**515/Q** Empapador 45x55 cm, (ancho x largo cama) para sillas (peso: 200 gr)  
**508/Q\*:** Empapador 85x115 cm,(ancho x largo cama) sin alas.  
**5010/QF\*:** Empapador 90x120 cm,(ancho x largo cama) con alas (alas 53x120 cm)

\*El color del vinilo es verde claro


**BO3346:** Bolsa empapador transparente de 33x46 cm opcional.

### Garantía:

MED-I-PANT, Inc. Quebec-Canadá, certifica que todos los materiales utilizados en la fabricación de este producto son exclusivamente de primera calidad. Este producto está garantizado frente a cualquier defecto de material o de fabricación. La duración y las prestaciones de este producto están subordinadas al cumplimiento de las instrucciones de lavado.

# EMPAPADOR "AURRORA"

Para butaca y sofá

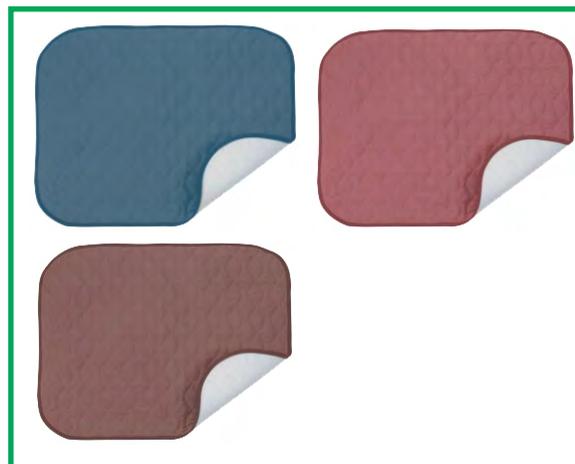

## Descripción:

- Empapador lavable con la parte superior de tipo "Aurora". 3 colores. 4 capas de materiales.
- Bordes de poliéster 35% y algodón 65%, color coordinado con la 1ª capa.
- Peso: 253 gr.

## Composición:

1ª capa (superior): 100% polyester. Color fijo. Gran duración.  
2ª capa (interior) Absorbente, 65% poliéster y 35% rayon (235 gr/m2).  
3ª capa (barrera): Película impermeable de vinilo entretejido con poliéster. Resistente a las arrugas.  
Borde: 35% poliéster y 65% algodón. Color coordinado con la 1ª capa..  
Hilo: Poliéster 100% alta resistencia (Poliéster 60 TEX).

## Lavado:

Lavado: Pre-lavado suave antes de usar, para eliminar exceso de color.

**50°** No utilizar suavizante. El suavizante reduce la capacidad de absorción.  
No utilizar lejía. Se recomienda el uso de blanqueadores oxigenados.

Secado: Temperatura máxima de lavado: 50° C.



Temperatura máxima de secado: 65° C. Recomendable que quede en el producto un 3-5% de humedad.  
Después de secado, se recomienda el uso de aire frío y seguidamente plegar y almacenar.


## Referencias:

**2122/A/VINEYARD:** Empapador "Aurora" 53x56 cm Color **VINO**  
**2122/A/BR** Empapador "Aurora" 53x56 cm Color **MARRÓN**  
**2122/A/BL** Empapador "Aurora" 53x56 cm Color **AZUL**  
**BO3346:** Bolsa empapador transparente de 33x46 cm opcional.

## Garantía:

MED-I-PANT, Inc. Quebec-Canadá, certifica que todos los materiales utilizados en la fabricación de este producto son exclusivamente de primera calidad. Este producto está garantizado frente a cualquier defecto de material o de fabricación. La duración y las prestaciones de este producto están subordinadas al cumplimiento de las instrucciones de lavado.

## BABERO "PERMA-PRINT"

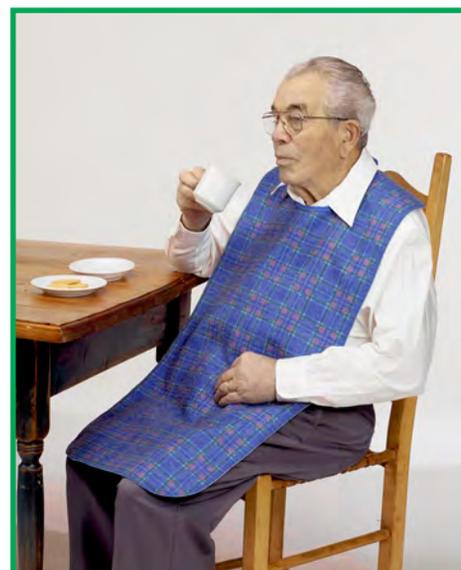

### Descripción:

- Babero super resistente con superficie de tejido absorbente y barrera impermeable. Cierre por "clip" ajustable en 3 posiciones.
- Bordes en color coordinado con el babero. Color permanente (resistente a la lejía). 3 diseños. Opcional en tipo "bolsillo".
- Peso: 170 gr.

### Composición:

- 1ª capa (superior): Absorbente. Mezcla de poliéster/rayon, tejido sin tejer "Perma-Print".  
**Colores resistentes a la lejía.**
- 2ª capa (barrera): Película 100% impermeable. Vinilo de alta resistencia de color blanco.  
Entretejido con una capa de poliéster 100%. Resistente a las arrugas.
- Bordes: Color coordinado con el diseño de la capa superior. 50% algodón y 50% poliéster.
- Hilo: Poliéster 100% de 1ª calidad.
- Clips de cierre: 2 machos y 2 hembras para ajustar en 3 posiciones diferentes. Acero inoxidable.  
Resistente a detergentes etc.

### Lavado:

- Lavado: Pre-lavado suave en agua fría antes de usar, para eliminar exceso de color.  
 65° No utilizar suavizante. El suavizante reduce la capacidad de absorción.  
**PUEDA UTILIZARSE LEJÍA. (240ml al 1%).**  
Temperatura máxima de lavado: 65° C.
- Secado: Temperatura máxima de secado: 65° C. Recomendable que quede en el producto un 3-5% de humedad.  
 Después de secado, se recomienda el uso de aire frío y seguidamente plegar y almacenar.

### Referencias:

- 70836/SG/B:** Babero 45x90 cm Color cuadros en blanco/azul/rosa  
**70836/SY/B:** Babero 45x90 cm Color cuadros en amarillo/azul  
**70836/SB/B:** Babero 45x90 cm Color cuadros en azul  
**BO2733:** Bolsa babero transparente de 27x33 cm opcional.

### Garantía:

MED-I-PANT, Inc. Quebec-Canadá, certifica que todos los materiales utilizados en la fabricación de este producto son exclusivamente de primera calidad. Este producto está garantizado frente a cualquier defecto de material o de fabricación. La duración y las prestaciones de este producto están subordinadas al cumplimiento de las instrucciones de lavado.

## BABERO "RAYADO VERDE"



### Descripción:

- Babero super resistente con superficie de tejido absorbente y barrera impermeable. Cierre por "clip" ajustable en 3 posiciones.
- Bordes en color coordinado con el babero. Color permanente (resistente a la lejía). Opcional en tipo "bolsillo".
- Peso: 170 gr.

### Composición:

- 1ª capa (superior): Absorbente. Mezcla 50/50 poliéster/algodón, a cuadros verdes tipo "sarga". La densidad es de 183.1gr. por m<sup>2</sup>. **Colores resistentes a la lejía.**
- 2ª capa (barrera): Película 100% impermeable. Vinilo de alta resistencia de color blanco. Entretejido con una capa de poliéster 100%. Resistente a las arrugas. Color coordinado con el diseño de la capa superior. 65% algodón y 35% poliéster entretejidos. Verde claro.
- Bordes: Poliéster 100% de 1ª calidad.
- Hilo: 1 macho y 3 hembras para ajustar en 3 posiciones diferentes. Acero inoxidable.
- Clips de cierre: Resistente a detergentes etc.

### Lavado:

Lavado: Pre-lavado suave en agua fría antes de usar, para eliminar exceso de color.

 **65°** **PUEDA UTILIZARSE LEJÍA. (240ml al 1%).**  
Temperatura máxima de lavado: 65° C.

Secado: Temperatura máxima de secado: 65° C. Recomendable que quede en el producto un 3-5% de humedad.  
 Después de secado, se recomienda el uso de aire frío y seguidamente plegar y almacenar.

### Referencias:

**10836/SD/B:** Babero 43x90 cm Color rayado verde

**BO2733:** Bolsa babero transparente de 27x33 cm opcional.

### Garantía:

MED-I-PANT, Inc. Quebec-Canadá, certifica que todos los materiales utilizados en la fabricación de este producto son exclusivamente de primera calidad. Este producto está garantizado frente a cualquier defecto de material o de fabricación. La duración y las prestaciones de este producto están subordinadas al cumplimiento de las instrucciones de lavado.

## BABERO DE POLIURETANO

### Descripción:

- Babero para adultos en poliuretano laminado sobre poliéster “cepillado”.
- Impermeable y transpirable, color azul, medidas 45x90 cm.
- Cierre por clip de acero inoxidable.”

### Lavado:

 Temperatura máxima 90 °C.

 No utilizar lejía.

Se recomienda el uso de blanqueadores oxigenados.



### Secado:

 Temperatura máxima 60°C. Tiempo máximo 10 min incluido enfriamiento.

Tanto el poliuretano como el poliéster no absorben humedad, por lo que un tiempo de secado muy reducido es suficiente.

Sobrepasar el tiempo o la temperatura de secado puede dañar la capa de poliuretano. Puede centrifugarse.

### Referencia:

**50836/S:** Babero de poliuretano

**BO2733:** Bolsa babero transparente de 27x33 cm opcional.

### Garantía:

MED-I-PANT, INC., Montreal (Canadá) certifica que todos los materiales utilizados en la fabricación de este producto son exclusivamente de primera calidad. La duración de este producto está subordinada al cumplimiento de las instrucciones de lavado. Este producto está garantizado frente a cualquier defecto de material o de fabricación. Todos los productos MIP cumplen las normativas europeas y disponen del marcado CE.

# PIJAMAS DEMENCIA

## **Referencia: ATV-080**

- Indicado para pacientes con demencia; tiene las mangas y patas cortas y cremallera en la espalda para usarlo como ropa interior.
- El paciente no puede quitárselo sin ayuda, por lo que no podrá desnudarse totalmente él solo, ni manipular los empapadores si los usa.

## **Referencia: ATV-081**

- Indicado especialmente para pacientes con incontinencia y demencia; tiene las mangas y patas largas para usarlo como pijama, con la cremallera en la parte interior de las piernas (de tobillo a tobillo) y el carro tapado por una solapa de tela, de manera que el paciente no puede abrirla y manipular los empapadores.
- Sin embargo el personal auxiliar puede cambiar fácilmente el empapador sin necesidad de quitar el pijama.
- También está indicado para proteger la piel de los pacientes que se lesionan rascándose.



## **Otras referencias:**

**ATV-1081:** Patas y mangas largas, cremallera en la espalda

**ATV-2081:** Patas y mangas largas, cremallera en piernas y espalda

**ATV-2080:** Patas y mangas cortas, cremallera en piernas y espalda

**ATV-2082:** Patas largas y mangas cortas, cremallera en piernas y espalda

## **Características:**

- 50% algodón, 50% poliéster.
- 4 tallas - S, M, L y XL.

## **Lavado:**

 Lavar a máquina 60°  No lejía

 Secadora  Planchado a temperatura suave

**ATENCIÓN: lavar del revés y con la cremallera cerrada.**

UGARI GERIÁTRICA

C/Venta de la Estrella 6, pab.126 - 01006 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)  
Tel (+34) 945 146 744; Fax (+34) 945 154 036; E-mail: ugari@ugari.es

[www.ugari.es](http://www.ugari.es)

# BATA PACIENTE

## Descripción:

- Bata de paciente de 1ª calidad con cobertura de espalda.
- Cierre por cintas en cuello y cintura (lado izdo.) para evitar la apertura accidental.
- Color azul.
- La densidad del tejido garantiza su OPACIDAD, es decir que no permite ver a su través. Completamente ribeteada.

## Características:

- Composición: 100% poliéster. 135 gr/m<sup>2</sup> (aprox.).
- Hilado tubular: Gran suavidad y resistencia al desgaste.
- Peso aprox.: 314 gr
- Dimensiones aprox: contorno 168 cm  
longitud 112 cm (desde el cuello hasta el borde)  
mangas 48 cm  
cintas 33 cm
- Costuras remalladas.
- Hilo: 65% algodón/ 35% poliester.



## Lavado:

Lavado: Pre-lavado suave en agua fría antes de usar, para eliminar exceso de color.

50°

No utilizar lejía. Se recomienda el uso de blanqueadores oxigenados.  
Temperatura máxima de lavado: 50° C.

Secado: Temperatura máxima de secado: 65° C. Recomendable que quede en el producto un 3-5% de humedad.



Después de secado, se recomienda el uso de aire frío y seguidamente plegar y almacenar.

## Referencia:

**PG-59:** Bata de paciente

**BO2733:** Bolsa babero transparente de 27x33 cm opcional.

## Garantía:

MED-I-PANT, Inc. Quebec-Canadá, certifica que todos los materiales utilizados en la fabricación de este producto son exclusivamente de primera calidad. Este producto está garantizado frente a cualquier defecto de material o de fabricación. La duración y las prestaciones de este producto están subordinadas al cumplimiento de las instrucciones de lavado.

# SÁBANA AJUSTABLE "PLUS"

Diseño especial para camas articuladas.



## Descripción:

- Sábana de 1ª calidad. Poco peso. Tejido especial: No necesita planchado ni plegado. Confort excepcional.
- Alta resistencia y muy buen ajuste (sin goma) para todos los colchones individuales, especialmente con somier articulado.
- El diseño especial patentado asegura que la sábana siempre está estirada sobre el colchón, también cuando el cabezal o el piecero de la cama están levantados.
- Peso: 610 gr

## Composición:

- Tejido: Tejido de construcción "Ringspun" (tubular) con 100% algodón peinado de 1ª calidad en la parte de arriba (60% del total de la sábana) y 100% poliéster (Denier 75) en la parte de abajo (40% del total de la sábana) Densidad; 150 gr/m2.
- Bordes: Bordes amarillos de poliéster 100%.  
Cosido de manera que proporciona elasticidad **sin necesidad de elástico, goma o similar.**
- Hilo: Hilo de poliéster 100%. Remate de seguridad en los bordes (remallado).

## Lavado:

Lavado: Temperatura máxima de lavado: 70° C.

 Uso de lejía con moderación. Recomendado el uso de blanqueadores oxigenados.

Secado: Temperatura máxima de secado: 75° C. Recomendable que quede en el producto un 3-5% de humedad.



Después de secado, se recomienda el uso de aire frío durante 3-5 minutos.

**NO PLANCHAR.** Reduce la elasticidad del tejido. No necesita plegar.

Después del secado puede plegarse o guardarse directamente en bolsas.

## Referencias:

**SK-3400-B:** Sábana ajustable de color blanco, para todos los colchones individuales (180-200x80-105 cm)

## Garantía:

MED-I-PANT, Inc. Quebec-Canadá, certifica que todos los materiales utilizados en la fabricación de este producto son exclusivamente de primera calidad. Este producto está garantizado frente a cualquier defecto de material o de fabricación. La duración y las prestaciones de este producto están subordinadas al cumplimiento de las instrucciones de lavado US PATENT N° 576524.

## SÁBANA ENCIMERA SEMI-AJUSTABLE "DUETTE"



### Descripción:

- Sábana encimera ajustable en la zona de los pies que **impide deshacer la cama**.
- Diseño especial con espacio extra para evitar presión en los pies/tobillos; permite el uso de taloneras.
- Sin elásticos (gomas).
- No necesita planchado ni plegado.
- Confort excepcional.

### Composición:

Tejido: Tejido de punto 50% algodón y 50% poliéster extra - tupido, elástico en ambas direcciones. (más en anchura) que permite su uso en todos los colchones individuales (180-200 x 80-105 cm).  
Peso 500 gr  
Bordes: Poliéster 100% color blanco.  
Hilo: Hilo de poliéster 100%. Remate de seguridad en los bordes (remallado).

### Lavado:

Lavado: Temperatura máxima de lavado: 70° C.

 Uso de lejía con moderación. Recomendado el uso de blanqueadores oxigenados.

Secado: Temperatura máxima de secado: 75° C. Recomendable que quede en el producto un 3-5% de humedad.

 Después de secado, se recomienda el uso de aire frío durante 3-5 minutos.  
**NO PLANCHAR.** Reduce la elasticidad del tejido. No necesita plegar.  
Después del secado puede plegarse o guardarse directamente en bolsas.

### Referencias:

**SK-3400-T:** Sábana encimera semi-ajutable de color blanco

### Garantía:

MED-I-PANT, Inc. Quebec-Canadá, certifica que todos los materiales utilizados en la fabricación de este producto son exclusivamente de primera calidad. Este producto está garantizado frente a cualquier defecto de material o de fabricación. La duración y las prestaciones de este producto están subordinadas al cumplimiento de las instrucciones de lavado US PATENT N° 576521.

## PROTECTORES PVC / RIZO

### Descripción:

- El protector de colchón de PVC SANITARIO sirve para proteger el colchón mediante una barrera infranqueable de los agentes externos como: manchas, líquidos, ácaros y olores.
- De esta forma le ayudamos a mejorar la vida de su colchón y lo mantendremos tan nuevo como el primer día.
- Este artículo es ideal en caso de incontinencias.
- Fácil colocación gracias a su platabanda ajustable con elástico en todo el perímetro.

Tejido innovador con altas cualidades en inducido PVC SANITARIO 16 micras impermeable, actúa de barrera antiácaros, esterilizable a 120°C y lavable 90°C, muy recomendado para hospitales y geriátricos por su resistencia y durabilidad.



### Propiedades:

- Impermeable
- Lavable
- Resistente
- 100% Algodón
- Absorbente
- Sanitario
- Ajustable
- Autoclave

### Composición:

Superficie: Bucle Rizo 100% Algodón.  
Tejido Total: 80% algodón 20% poliéster.

Base: PVC SANITARIO.  
Peso: 375 +/- 10gr/m2.



### Lavado:

- 90° Lavar a máquina 90°
- No lavado en seco
- No lejía
- Secadora a 60°
- No plancha

### Referencias:

**ATV-PVC-01:** 190/200x90 cm (válido también para colchones de 200x90 cm)

# PROTECTORES Y FUNDAS PU / RIZO

## Descripción:

- El protector de colchón, la funda de almohada y la funda completa de poliuretano rizo sirve para proteger mediante una barrera infranqueable de los agentes externos como: manchas, líquidos, ácaros y olores.
- Este artículo es ideal para bebés y adultos, en caso de incontinencias.
- El protector de colchón de fácil colocación gracias a su platabanda ajustable con elástico en todo el perímetro.
- La funda completa y la funda de almohada se colocan fácilmente gracias a su cremallera en forma de L.

Tejido innovador con altas cualidades en poliuretano impermeable transpirable, gracias a las cualidades de poliuretano micro poroso, respira su piel y evita el calor y el sudor.

Transpirabilidad: 700 gr/m<sup>2</sup>/día.

Alta flexibilidad.

Barrera anti-ácaros.

## Propiedades

- Impermeable
- Transpirable
- Absorbente
- 100% Algodón
- No da calor
- Ajustable
- Antibacteriano
- PU laminado

## Composición

Superficie: Bucle Rizo 100% Algodón.  
Tejido Total: 80% algodón 20% poliéster.

Base: PU

Peso: 145 +/- 10 gr/m<sup>2</sup>.

## Lavado

90° Lavar a máquina 90°  No lavado en seco  No plancha

No lejía  Secadora a 60°

## Referencias:


### Protector de colchón:

**ATV-PUR-01:** 190/200x90 cm (válido también para colchones de 200x90 cm)

### Funda completa:

**ATV-PUR-03:** 190x90x14/15 cm

**ATV-PUR-04:** 200x90x14/15 cm

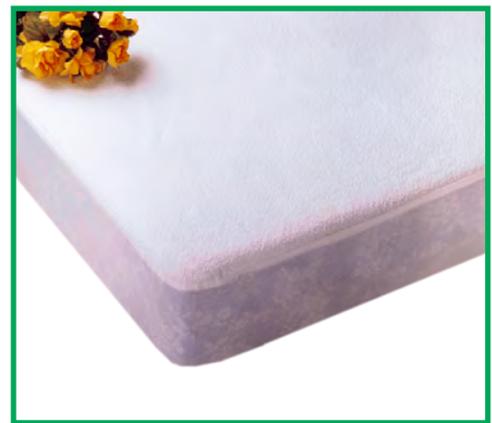

# PROTECTORES Y FUNDAS PU

## Descripción:

- Protegen los colchones y almohadas para que no entren en contacto con: ácaros, olores, manchas, gérmenes, hongos y sudor.
- Crea una barrera antiácaros y es impermeable, transpirable e ignífuga.
- Es silencioso, es flexible, fácil de poner y resistente.
- El tejido Bi-elástico se amolda a la forma una vez enfundado y es muy resistente.
- El recubrimiento de poliuretano es impermeable transpirable, y tiene la propiedad **ignífuga M1** (excepto los modelos ATV-PU-02, ATV-PU-13 y ATV-PU-24), que quiere decir que es un material combustible pero no inflamable.

## Limpieza:

Su limpieza es simple, con tan sólo pasar una esponja y humedecerla con algún producto desinfectante es suficiente.

Se puede lavar a máquina a 90°.

Permite el lavado en secadora a temperatura moderada, no planchar y no utilizar lejía.

## Propiedades:

- Impermeable
- Silencioso
- PU laminado
- Transpirable
- Bi-elástico
- Antiacaros
- Ajustable

## Composición fundas UGARI ignífugas:

Tejido Total: 45% Poliéster 55% Poliuretano.

Peso: 160 +/- 10 gr/m2.

Transpirabilidad: + 1.500 gr/m2/día.

## Composición fundas UGARI no ignífugas:

Tejido Total: 70% Poliéster 30% Poliuretano

Peso: 120 +/- 10 gr/m2.

Transpirabilidad: 683 gr/m2/día

## Lavado:

 Lavar a máquina 90°  No lavado en seco  No planchar  No lejía  Secadora a 60°

## Referencias:

### Protector de colchón:

**ATV-PU-01:** Protector ajustable Ugari 190/200x90 cm, ignífugo

**ATV-PU-02:** Protector ajustable Ugari 190/200x90 cm, no ignífugo

### Funda completa:

**ATV-PU-10:** Funda sanitaria completa Ugari 190x90x14 cm, ignífuga

**ATV-PU-13:** Funda completa Ugari 190x90x14 cm, no ignífuga

### Funda de almohada:

**ATV-PU-20:** Funda de almohada Ugari 90x40 cm con cremallera, ignífuga

**ATV-PU-24:** Funda de almohada Ugari 90x40 cm con cremallera, no ignífuga

**806/W/PU:** Funda de almohada MIP 95x50 cm con solapa



### Tratamiento antibacteriano Sanitized

Es un tratamiento innovador aplicado al tejido que impide la proliferación de microorganismos.

Elimina los microorganismos antes de que entre en contacto con el organismo humano.

Impide la proliferación de manchas de moho, olores y bacterias.

## BATA REUTILIZABLE IMPERMEABLE MIP (CANADÁ)

### Descripción:

- La bata de impermeable de microfibra está diseñada con menos costuras para minimizar, aún más si cabe, la penetración de líquidos, y aumentar la durabilidad de la bata.
- Los hilos de carbono reducen la acumulación de electricidad estática.
- El tejido es transpirable y brinda frescura, comodidad, durabilidad y el secado es extremadamente rápido.
- Es reversible para proporcionar practicidad y ayuda reducir el tiempo de trabajo en la lavandería.
- Las propiedades resistentes a las manchas reducen el costoso lavado de ropa.
- Los puños elásticos cubren y fijan la bata de forma segura la zona de la muñeca. El secado de los puños es muy rápido.
- El diseño de la bata envolvente facilita comodidad a la hora de la colocación de la bata y mejora la estanqueidad.



Puños ajustables de secado rápido



Diseño bata envolvente



### Características técnicas:

#### Medidas:

- Largo bata (desde el cuello): 115 cm.
- Circunferencia total (a la altura de la cintura): 160 cm.
- Largo manga desde el cuello (incluido puño): 83 cm.
- Largo manga desde la axila (incluido puño): 60 cm.
- **Puño:** 10 cm.
- **Peso:** 280 gr.
- **Tejido:** Certificado Standard 100 OEKO-TEX
- **Composición:** 99% fibra de poliéster, 1% fibra de carbono

#### Lavado:

- Hasta 75 ciclos de lavado a una temperatura máxima de 75°C.
- La temperatura máxima de secado es 60°C.

#### Certificados:

- Producto sanitario clase I
- Cumple la norma ANSI/AAMI Pb70 Nivel 2, una norma estándar para batas quirúrgicas exigido por la FDA (Agencia EEUU de medicamentos y alimentos) equiparable a la EN-13795 para batas quirúrgicas de prestaciones estándar
- Certificado CE

#### Referencia:

**EHX4200-WAC:** Bata reutilizable impermeable MIP

UGARI GERIÁTRICA

C/Venta de la Estrella 6, pab.126 - 01006 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)  
Tel (+34) 945 146 744; Fax (+34) 945 154 036; E-mail: ugari@ugari.es

[www.ugari.es](http://www.ugari.es)

## JUMBOREST - REPOSABRAZOS UNIVERSAL



- Corrección postural para todos los tipos de mesas. Universal, ajustable y portátil.
- Desarrollado en colaboración con terapeutas ocupacionales.
- Diseñado para todo tipo de actividades en mesas de comedor, estudio, terapia, etc. sean rectangulares o redondas , incluso con faldón (hasta 130mm incluido tablero).
- También compatible con encimeras de cocinas adaptadas (con espacio libre bajo la encimera).
- Tornillo opcional para bloqueo en la posición deseada.
- Montaje e instalación extremadamente sencillos. Permite transportarlo fácilmente para su uso en casa, en el trabajo, el restaurante, etc.
- Ajustable sin herramientas a lo largo del tablero.
- El uso de dos unidades convierte cualquier mesa normal en una mesa ergonómica con escotadura.

### Accesorios:



### Características técnicas:

- ① Superficies anti-deslizantes para una correcta sujeción a la mesa.
- ② Zona de apoyo suave y de fácil limpieza
- ③ Tres diferentes posiciones (derecha/central/izquierda): libre acceso para sillas de ruedas con apoyabrazos
- ④ Sujeción ajustable: para tableros entre 20 y 45 mm de grosor.
- ⑤ Estructura resistente: soporta un peso de 100Kg.



### Referencias:

952200: Reposabrazos universal Jumborest

952203: Fijación Jumborest

# JUMBOREST - TABLAS PORTÁTILES

## Tabla portátil Jumborest Access


- La tabla portátil Jumborest Access se puede colocar en mesas de escritorio para proporcionar un espacio de trabajo funcional para personas con necesidad adicional del espacio.

### Características técnicas:

- Grosor inferior a 6 mm.
- Superficie lisa = fácil limpieza e higiene
- Dimensiones totales = 690 x 420 x 6 mm.
- Dimensiones de la tabla = 600 x 300 mm.
- Brazo de sujeción = compatible con encimeras de hasta 40 mm. de grosor.
- Brazo desmontable = Plegable y portátil

### Uso:

- Facilita y proporciona el acceso a las mesas de escritorio.

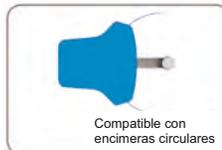

### Referencias:

**961800:** Tabla portátil Jumborest Access. Color azul

## Tabla portátil Jumborest Mini Access


- La tabla portátil Jumborest Mini Access se puede colocar en mesas de escritorio para proporcionar un espacio de trabajo funcional para personas con necesidad adicional del espacio.

### Características técnicas:

- Grosor inferior a 6 mm.
- Superficie lisa = fácil limpieza e higiene
- Dimensiones totales = 400 x 420 x 6 mm.
- Dimensiones de la tabla = 600 x 300 mm.
- Brazo de sujeción = compatible con encimeras de hasta 40 mm. de grosor.
- Compacta, portátil, versátil, de estética agradable, ligera y duradera.
- Brazo desmontable = Plegable y portátil

### Uso:

- Facilita y proporciona el acceso a las mesas de escritorio.

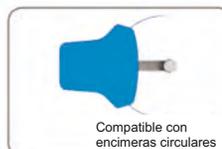

### Referencias:

**967700:** Tabla portátil Jumborest Mini Access. Color blanco

## NIMBLE - CÚTER EN FORMA DE DEDAL



### Descripción:

- El cúter de dedo “Nimble” lo puede usar cualquier persona de forma sencilla.
- El cúter “Nimble” cuenta con una pieza cerámica especial para realizar el corte. Corta plástico y papel de forma sencilla, sin esfuerzo y con gran precisión. Proporciona una mayor seguridad en comparación con el uso de tijeras, cuchillos o cúters.
- Es compacto y fácil de transportar. Su color vivo permite su localización de forma sencilla.
- Se fabrica en una única talla que se amolda a cualquier tamaño de dedo.
- La cuchilla del cúter “Nimble” está fabricada en zirconio, una cerámica más dura que el acero.



### Referencias:

22.001.001: Nimble cúter en forma de dedal



# GRIOBALLS

Las personas con pérdida de fuerza y/o problemas de movilidad en las manos encuentran habitualmente grandes dificultades para usar utensilios cotidianos como cepillos para el pelo, cubiertos para comer, cepillos de dientes o bolígrafos.

Los sistemas GRIPOBALLS pueden adaptarse a cada uno de estos utensilios, sin necesidad de tener que adquirir unos especialmente adaptados.

## Gripoballs

Gripoballs son unas bolas de goma que se pueden colocar en la mayoría de utensilios que se utilizan en la vida cotidiana para garantizar un mejor agarre.

### Referencias:

**GRI1010B:** Gripoballs 3 uds



## Gripograms

Los Gripograms son unas bolas de acero que permiten el aumento de peso de los Gripoballs de acuerdo a las necesidades específicas de cada usuario. El uso de Gripograms reduce el temblor en las manos y permite una mejor coordinación de movimientos. Los Gripograms están recomendados para personas con dispraxia, Parkinson, esclerosis o hemiplejías.

### Referencias:

**GRIW1010:** Gripograms 5 uds.



## Banda Gripofix

La correa Gripofix es una banda de neopreno metacarpiana que combinado con los Gripoballs permite fijar los utensilios cotidianos a la mano de las personas que tienen la musculatura de la mano debilitada o paralizada.

### Referencias:

**GRIFX01W:** Banda Gripofix. Color blanco. 33cm x 4 cm x 2 mm

**GRIFX01B:** Banda Gripofix. Color negro. 33cm x 4 cm x 2 mm

**GRIFXSETW:** 1 Banda Gripofix blanca, 5 Gripograms y 3 Gripoballs

**GRIFXSETB:** 1 Banda Gripofix negra, 5 Gripograms y 3 Gripoballs



## Banda GripoKid para niños

La correa GripoKid permite la fijación de utensilios de cocina a los niños más pequeños que tienen problemas en la musculatura de la mano. Las medidas de las bandas son 20 cm x 2,5 cm x 2 mm e incluyen 2 uds.

### Referencias:

**GRIPOKID2:** Banda GripoKid (para niños). Color negro 2 uds.  
20 cm x 2.5 cm x 2 mm



## Banda Usyfix

Las bandas Usyfix permiten la fijación de múltiples elementos al cuerpo. Pueden ajustarse al brazo, tobillo, pierna u hombros. Pueden ser modificadas cortándolas a la medida requerida.

### Referencias:

**GRIFXT1W:** Color blanco. Banda de 33 x12 cm

**GRIFXT1B:** Color negro. Banda de 33 x12 cm

**GRIFXT2W:** Color blanco. Banda de 40 x 12 cm

**GRIFXT2B:** Color negro. Banda de 40 x 12 cm

**GRIUSIFW:** Color blanco. Banda de 40 x 12 cm + 33 x12 cm

**GRIUSIFB:** Color negro. Banda de 40 x 12 cm + 33 x12 cm



# CUBERTERIA Y ACCESORIOS COCINA WEBEQU

## CUCHILLOS WEBEQU


### Cuchillos ergonómicos Webequ

Los cuchillos Webequ tienen un diseño muy cuidado y unas empuñaduras ergonómicas que facilitan el agarre y que optimizan la fuerza del movimiento de corte.

Las empuñaduras facilitan el proceso de corte y deslizamiento del cuchillo, obteniendo un control, estabilidad y balance óptimos del cuchillo.

Con los cuchillos Webequ se necesita realizar un 30% menos esfuerzo para realizar el corte con respecto a otros cuchillos.

Están especialmente recomendados para personas con poca fuerza, con temblores y/o disfunciones en brazos, manos u hombros.

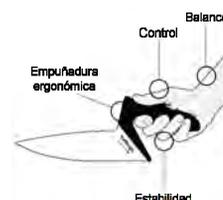

### Cuchillo ergonómico Webequ para carne

- El cuchillo ergonómico Webequ para carne proporciona un gran control y potencia extra, lo que le permitirá obtener un excelente resultado de sus esfuerzos.
- El nuevo agarre requiere menos fuerza en el brazo y le permite trabajar sin esfuerzo, incluso durante más tiempo.
- El cuchillo Webequ para chefs se puede recomendar a personas con una fuerza reducida en el brazo o el hombro.

Ref.	
	11012

**Material:** Acero inoxidable 3CR13, 2 mm, Rockwell 52-54.  
Empuñadura de plástico antideslizante  
**Longitud de la hoja:** 22,2 cm  
**Peso:** 155 gr.



### Cuchillo ergonómico Webequ para verduras

- El agarre innovador y ergonómico ofrece un excelente control, estabilidad y equilibrio cuando se trocean y pican las verduras.
- Este agarre requiere menos uso de fuerza y, por lo tanto, puede trabajar más tiempo sin experimentar fatiga.
- Este cuchillo se recomienda para personas con fuerza reducida de brazos y hombros.

Ref.	
	12012

**Material:** Acero inoxidable 3CR13, 2 mm, Rockwell 52-54.  
Empuñadura de plástico antideslizante  
**Longitud de la hoja:** 17,8 cm  
**Peso:** 140 gr.



### Cuchillo ergonómico Webequ para pan

- El agarre innovador y ergonómico ofrece un excelente control y, por lo tanto, puede romper incluso las cortezas más resistentes y cortar su rebanada de pan tal y como lo desee.
- Este agarre requiere menos uso de fuerza y, por lo tanto, puede trabajar más tiempo sin experimentar fatiga.
- Este cuchillo de pan se recomienda para personas con fuerza reducida de brazos y hombros.

Ref.	
	10012

**Material:** Acero inoxidable 3CR13, 2 mm, Rockwell 52-54.  
Empuñadura de plástico antideslizante  
**Longitud de la hoja:** 22,2 cm  
**Peso:** 185 gr.



# CUBERTERIA Y ACCESORIOS COCINA WEBEQU

## ACCESORIOS WEBEQU

### Soporte para cuchillos Webequ

- El artículo ideal para guardar los cuchillos ergonómicos Webequ. Este portacuchillos permite que el filo de los cuchillos se mantenga afilado durante más tiempo y que siempre estén al alcance de la mano.
- El porta cuchillo Webequ tiene espacio para 3 cuchillos y está fabricado en madera de acacia que permite un almacenamiento elegante y seguro para los cuchillos Webequ.

**Material:** Madera acacia  
**Medidas:** 13,5 x 12x 4,5 cm  
**Peso:** 330 gr.

Ref:	
	18051



### Tabla para cortar alimentos Webequ

- Tabla para cortar alimentos con un diseño innovador y una calidad inmejorable.
- Especialmente útil para picar y cortar verduras, carne y pan. Los bordes altos en los laterales aseguran que los trozos y las migas no caigan por los bordes. Al mismo tiempo, los bordes en los laterales proporcionan control y estabilidad cuando, por ejemplo, se vierten verduras finamente cortadas a la sartén o cazuela.
- La superficie de corte tiene una ligera pendiente hacia el borde trasero que permite que el líquido se recoja en la parte posterior de la tabla de cortar y se pueda verter fácilmente después del uso.
- En la parte inferior de la tabla tiene 4 pies que permiten la fijación de la tabla a cualquier superficie.

Ref:	
	18001

**Material:** Polipropileno (PP)  
**Medidas:** 29 x 34 x 4.9 cm  
**Peso:** 550 gr.



### Pelador ergonómico Webequ

- El pelador ergonómico Webequ está especialmente recomendado para todos los usuarios que tienen problemas con el agarre de un pelador de verduras convencional.
- Los dedos se introducen a través del soporte en la parte posterior, y la cuchilla de corte flexible sigue el contorno de las frutas y verduras para un corte limpio y seguro.

**Material:** Polipropileno (PP) y acero  
**Medidas:** 7 x 7 x 4 cm.  
**Peso:** 20 gr.

Ref:	
	20001



# CUBERTERIA Y ACCESORIOS COCINA WEBEQU

## GUANTES Y CUBIERTOS WEBEQU

### Guantes de seguridad Webequ

- Los guantes de seguridad Webequ evitan cortes en las manos producidos por los utensilios de cocina.
- Son muy ligeros y flexibles permitiendo realizar cualquier trabajo en la cocina con ellos.
- Proporcionan el más alto nivel de seguridad (categoría 5).
- Cada paquete contiene un par de guantes.
- Se pueden lavar a máquina.

<b>Material:</b> 45% Polietileno 20% Poliéster 13% Poliamida	12% Elasteno 10% Fibra de vidrio	<b>Peso:</b> 68 gr. <b>Talla:</b> Única
--	-------------------------------------	--



Ref:	
	20051

### Set de cubiertos Webequ con empuñadura ergonómica

- El Set de cubiertos Webequ de 4 piezas con empuñaduras ergonómicas consta de 1 tenedor, 1 cuchillo, 1 cuchara y 1 cucharilla.
- Las empuñaduras de gran tamaño y con función antideslizante permiten un mejor control de los cubiertos para las manos con menos fuerza o doloridas.
- Los cubiertos están hechos de materiales ligeros y se pueden limpiar en el lavavajillas.
- Se pueden doblar una vez si es necesario para conseguir la inclinación del cubierto adecuada para el usuario.

<b>Material:</b> Polipropileno y acero inoxidable	<b>Apto para lavavajillas.</b>
<b>Características técnicas:</b>	
<b>Cuchillo:</b> Longitud total: 21,3 cm Longitud empuñadura: 10.5 cm Peso: 62 gr.	
<b>Tenedor:</b> Longitud total: 19,3 cm Longitud empuñadura: 10.5 cm Peso: 62 gr.	
<b>Cuchara:</b> Longitud total: 19 cm Longitud empuñadura: 10.5 cm Peso: 72 gr.	
<b>Cucharilla:</b> Longitud total: 17,7 cm Longitud empuñadura: 10.5 cm Peso: 62 gr.	



Ref:	
	20061

## VAJILLA ORNAMIN

Más modelos disponibles bajo pedido  
en nuestra página web  
[www.ugari.es](http://www.ugari.es)

### Modelos 201/203. Platos y cuencos térmicos (melamina / polipropileno)

- Especialmente indicados para personas que comen lentamente, ya que mantienen durante más tiempo la comida caliente.
- Evitan que el usuario se quemara al cogerlos, ya que el calor se concentra en la parte inferior del plato.
- Fabricados en melamina de alta calidad en la parte interior y termoplástico en la exterior, disponen de dos agarres en suave plástico antideslizante con dos funciones: proporcionan un agarre seguro y sirven de tapón para los orificios por los que se introduce el agua caliente que permite mantener la temperatura de los alimentos.



<b>Material:</b> Mel/PP	<b>Capacidad:</b> 425 ml	<b>Apto para el lavavajillas</b>
<b>Altura:</b> 42 mm	<b>Peso:</b> 450 g	<b>No apto para microondas</b>
<b>Ø:</b> 255 mm		

Modelo 201				
Ref:	10866 Azul	10864 Amarillo	10865 Verde	10863 Rojo

<b>Material:</b> Mel/PP	<b>Capacidad:</b> 300 ml	<b>Apto para el lavavajillas</b>
<b>Altura:</b> 63,5 mm	<b>Peso:</b> 224,5 g	<b>No apto para microondas</b>
<b>Ø:</b> 190 mm		

Modelo 203				
Ref:	10861 Azul	10859 Amarillo	10860 Verde	10858 Rojo

# VAJILLA ORNAMIN

## Vajilla Serie Vital (melamina)

- El innovador plato "VITAL" combina a la perfección diseño y funcionalidad.
- Fabricado en melamina no tiene el borde levantado típico, sino un diseño notablemente superior: **el fondo del plato está inclinado lo que hace que la comida caiga hacia un lado por si sola lo que unido a un borde de 90°, hace mucho más sencilla su recogida con una cuchara y una sola mano.** Sin embargo su apariencia normal y sus colores sumamente alegres lo alejan de cualquier aspecto "hospitalario" o "adaptado".
- La parte inferior antideslizante evita que el plato se vuelque o resbale.



### Modelo 901. Plato Vital ø 26 cm (melamina)

<b>Material:</b> Melamina	<b>Capacidad:</b> 800 ml	<b>Apto para lavavajillas.</b> <b>No apto para microondas.</b>
<b>Altura:</b> 41 mm	<b>Peso:</b> 490 g	
<b>Ø:</b> 259 mm		



### Modelo 902. Plato Vital ø 20 cm (melamina)

<b>Material:</b> Melamina	<b>Capacidad:</b> 390 ml	<b>Apto para lavavajillas.</b> <b>No apto para microondas.</b>
<b>Altura:</b> 35 mm	<b>Peso:</b> 296 g	
<b>Ø:</b> 200 mm		



### Modelo 903. Plato Vital ø 15,5 cm (melamina)

<b>Material:</b> Melamina	<b>Capacidad:</b> 190 ml	<b>Apto para lavavajillas.</b> <b>No apto para microondas.</b>
<b>Altura:</b> 35 mm	<b>Peso:</b> 154 g	
<b>Ø:</b> 155 mm		



Modelo						Ref.
	Blanco	Azul	Amarillo	Verde	Rojo	
901	5790	11189	11190	11191	10521	
902	9307	11751	11752	11753	10144	
903	8170	9654	9655	9656	9657	

# VAJILLA ORNAMIN

## REBORDES PARA PLATOS Y CUCHARAS

### Modelo 709. Reborde para platos (ABS)

- Permite al usuario empujar la comida contra el mismo y ponerla más fácilmente en la cuchara o en el tenedor. Se adapta a diferentes tamaños de platos (de 20 cm a 27 cm de diámetro).

<b>Material:</b> ABS	<b>Apto para lavavajillas.</b>
<b>Peso:</b> 34 g	<b>Apto para microondas.</b>



Modelo 709	
	2491 Blanco

### Modelo 710. Reborde para cucharas

- El reborde para cucharas es una ayuda muy útil que facilita la ingestión de alimentos a las personas con temblores en las extremidades superiores.
- Especialmente indicado para personas con apoplejias o Parkinson.
- Se puede colocar en cualquier tipo de cuchara.
- Está fabricado en TPE, material flexible e insípido (certificado para alimentos, libre de bisfenol-A), sensación agradable en la boca mientras ingiere los alimentos.
- Para usos múltiples: perfectamente adecuado para los centros de día, residencias, hospitales o clínicas geriátricas.

<b>Material:</b> TPE	<b>Apto para lavavajillas.</b>
<b>Peso:</b> 2 g	<b>Apto para microondas.</b>

Modelo 710	
	15107 3 uds



## AYUDAS PARA FIJAR ALIMENTOS

### Modelo 900. Soporte para sandwich (melamina)

<b>Material:</b> Melamina	<b>Altura:</b> 15,5 mm	<b>Apto para lavavajillas.</b>
<b>Largo:</b> 220 mm	<b>Peso:</b> 360 g	<b>No apto para microondas.</b>
<b>Ancho:</b> 170 mm		

Modelo 900	
	6263 Blanco



### Modelo 960. Fijador de alimentos (PC)

<b>Material:</b> PBT	<b>Apto para lavavajillas.</b>
<b>Peso:</b> 34 g	<b>Apto para microondas.</b>

Modelo 960	
Ref:	11449 Blanco



# VAJILLA ORNAMIN

## CONJUNTO VAJILLA USO DIARIO

### Vajilla serie Klassik

- La serie Klassik ofrece una solución elegante para comedores, cafeterías, escuelas, guarderías, residencias y hospitales (y también para su uso en actividades como acampada, vela...). Los platos de esta serie cuentan con un estrecho anillo exterior, que permite diferenciar claramente el interior.
- Tanto el borde de los platos como el interior pueden tener diferentes decoraciones y personalizaciones.
- La serie Klassik es un conjunto completo de vajilla fabricado en melamina, que conjuga una gran resistencia con una elegancia propia de la porcelana.



### Modelo 502. Platillo ø 15 cm (melamina)

<b>Material:</b> Melamina	<b>Apto para lavavajillas.</b> <b>No apto para microondas.</b>
<b>Altura:</b> 15 mm	
<b>Ø:</b> 156 mm	
<b>Peso:</b> 120 g	



### Modelo 503. Plato llano ø 22 cm (melamina)

<b>Material:</b> Melamina	<b>Apto para lavavajillas.</b> <b>No apto para microondas.</b>
<b>Altura:</b> 17 mm	
<b>Ø:</b> 222 mm	
<b>Peso:</b> 230 g	



### Modelo 504. Plato llano ø 26 cm (melamina)

<b>Material:</b> Melamina	<b>Apto para lavavajillas.</b> <b>No apto para microondas.</b>
<b>Altura:</b> 19 mm	
<b>Ø:</b> 260 mm	
<b>Peso:</b> 290 g	



### Modelo 505. Plato hondo ø 22 cm (melamina)

<b>Material:</b> Melamina	<b>Capacidad:</b> 600 ml	<b>Apto para lavavajillas.</b> <b>No apto para microondas.</b>
<b>Altura:</b> 33 mm	<b>Peso:</b> 250 g	
<b>Ø:</b> 222 mm		



		Modelo	502	503	504	505	Ref.
BLANCO			571	591	605	616	
BORDE	Azul		9683	9677	9679	9681	
	Amarillo		10040	10047	9680	10060	
	Verde		10041	10048	10058	10061	
	Rojo		9684	9678	10208	9682	

# VAJILLA ORNAMIN

## BOLES

### Modelo 435. Bol 600 ml (melamina)

<b>Material:</b> Melamina	<b>Capacidad:</b> 600 ml	<b>Apto para lavavajillas.</b> <b>No apto para microondas.</b>
<b>Altura:</b> 73 mm	<b>Peso:</b> 135 g	
<b>Ø:</b> 137 mm		

Modelo 435	
Ref:	10091 Blanco



### Modelo 632. Bol 320 ml (melamina)

<b>Material:</b> Melamina	<b>Capacidad:</b> 320 ml	<b>Apto para lavavajillas.</b> <b>No apto para microondas.</b>
<b>Altura:</b> 47 mm	<b>Peso:</b> 105 g	
<b>Ø:</b> 125 mm		

Modelo 632					
	5908 Blanco	7032 Azul	7029 Amarillo	7031 Verde	7030 Rojo



## VASOS Y TAZAS

### Modelo 805. Vaso pistero 250 ml (polipropileno)

- Estos vasos pisteros son ideales para el uso diario en residencias y centros de día. Están disponibles en diferentes colores con acabado transparente para que pueda verse a través del vaso el líquido y controlar la toma por medio de la escala graduada.
- La rugosidad de la parte exterior facilita el agarre a los pacientes.

<b>Material:</b> PP	<b>Capacidad:</b> 250 ml	<b>Apto para lavavajillas.</b> <b>Apto para microondas.</b>
<b>Altura:</b> 100 mm	<b>Peso:</b> 30 g	
<b>Ø:</b> 71 mm		

Modelo 805							
Ref:	1149 Azul	1147 Amarillo	1150 Verde	1146 Natural	1445 Naranja	1148 Rojo	1151 Turquesa



### Modelo 501. Taza 200 ml (SAN)

<b>Material:</b> SAN	<b>Capacidad:</b> 200 ml	<b>Apto para lavavajillas.</b> <b>Apto para microondas.</b>
<b>Altura:</b> 58 mm	<b>Peso:</b> 67 g	
<b>Ø:</b> 79 mm		



### Modelo 508. Taza 300 ml (SAN)

<b>Material:</b> SAN	<b>Capacidad:</b> 300 ml	<b>Apto para lavavajillas.</b> <b>Apto para microondas.</b>
<b>Altura:</b> 80 mm	<b>Peso:</b> 90 g	
<b>Ø:</b> 79 mm		

Modelo						Ref.
	Blanco	Azul	Amarillo	Rojo	Verde	
501	483					
508	1087	7306	9627	9628	11460	



# VAJILLA ORNAMIN

## VASOS Y TAZAS

### Modelo 1201. Taza ergonómica 350 ml (PBT)

- Esta taza realizada en PBT ofrece un diseño moderno y colorido.
- Su asa ergonómica, extra grande y abierta, facilita su agarre y hace que su utilización sea cómoda y segura. Además, la taza es apilable para ahorrar espacio.
- Fabricada en un material muy ligero hace que sea más fácil beber de forma independiente.

<b>Material:</b> PBT	<b>Capacidad:</b> 350 ml	<b>Apto para lavavajillas.</b> <b>Apto para microondas.</b>
<b>Altura:</b> 100 mm	<b>Peso:</b> 127 g	
<b>Ø:</b> 90 mm		



Modelo 1201					
	12663 Blanco	12659 Azul	12660 Amarillo	12661 Verde	12662 Rojo

### Modelo 816. Vaso con doble asa ErgoPlus 250 ml (polipropileno)

- Con sus dos asas, el vaso ErgoPlus ofrece más estabilidad y asegura un fácil agarre. El ErgoPlus está bien adaptado para las personas que tiritan o sufren de temblores. El uso del vaso ErgoPlus anima a los pacientes a beber de forma independiente sin que se derrame el líquido de su interior.

<b>Material:</b> PP	<b>Capacidad:</b> 250 ml	<b>Apto para lavavajillas.</b> <b>Apto para microondas.</b>
<b>Altura:</b> 100 mm	<b>Peso:</b> 90 g	
<b>Ø:</b> 71 mm		



Modelo 816		
Ref:	3195 Azul	3191 Naranja

### Taza térmica clásica (polipropileno)

- La taza térmica clásica **fosforescente** cumple con su promesa: Es fácil de verla en la oscuridad, las bebidas calientes se mantienen calientes, las frías se mantienen frescas.

Modelo 210	
	5124 Fosforescente



### Modelo 207. Taza térmica Vital 200 ml (polipropileno)

- La taza térmica Vital añade a las características de la taza Térmica su **forma cónica interior, que permite al usuario vaciar el vaso sin inclinar la cabeza hacia atrás.**

<b>Material:</b> PP/PP	<b>Capacidad:</b> 200 ml	<b>Apto para lavavajillas.</b> <b>Apto para microondas.</b>
<b>Altura:</b> 108,5 mm	<b>Peso:</b> 145 g	
<b>Ø:</b> 80,5 mm		

Modelo 207				
Ref:	11788 Azul	11790 Amarillo	11791 Verde	11792 Rojo



# VAJILLA ORNAMIN

## VASOS Y TAZAS

### Modelo 815. Taza térmica Vital con doble asa 200 ml (polipropileno)

- La **forma cónica en el interior permite vaciar el vaso sin inclinar la cabeza hacia atrás**. Las dos asas extra grandes garantizan la estabilidad incluso en usuarios con grandes temblores. Además la función térmica permite mantener por más tiempo la bebida fría o caliente.
- Con la taza térmica Vital de doble asa los usuarios pueden beber con independencia sin derramar el líquido.

<b>Material:</b> PP	<b>Capacidad:</b> 200 ml	<b>Apto para lavavajillas.</b> <b>Apto para microondas.</b>
<b>Altura:</b> 108,5 mm	<b>Peso:</b> 147 g	
<b>Ø:</b> 80,5 mm		

Modelo 815				
Ref:	12485 Azul	12487 Amarillo	12488 Verde	12489 Rojo



### Modelo 511. Tapa boca estrecha (polipropileno)

<b>Material:</b> PP	<b>Apto para lavavajillas.</b> <b>Apto para microondas.</b>
<b>Ø:</b> 10 mm	
<b>Peso:</b> 20 g	



### Modelo 512. Tapa boca ancha (polipropileno)

<b>Material:</b> PP	<b>Apto para lavavajillas.</b> <b>Apto para microondas.</b>
<b>Ø:</b> 20 mm	
<b>Peso:</b> 20 g	



Modelo		Referencia	Válidas para tazas modelo:			
511		2388 natur-transp.	420	501	508	510
512		2389 natur-transp.	420	501	508	510

### Modelo 806. Tapa pistero boca estrecha (polipropileno)

- Tapas con boquilla ergonómica extra-larga para facilitar la toma de líquidos.
- Todas las tapas están hechas de plástico grueso, resistente, fácil de limpiar y resistentes a la mordedura.

<b>Material:</b> PP	<b>Apto para lavavajillas.</b> <b>Apto para microondas.</b>
<b>Ø:</b> 5 mm	
<b>Peso:</b> 20 g	



### Modelo 807. Tapa pistero boca ancha (polipropileno)

- Tapas con boquilla ergonómica extra-larga para facilitar la toma de líquidos.
- Todas las tapas están hechas de plástico grueso, resistente, fácil de limpiar y resistentes a la mordedura. La tapa con abertura grande es muy adecuada para pures y sopas.

<b>Material:</b> PP	<b>Apto para lavavajillas.</b> <b>Apto para microondas.</b>
<b>Ø:</b> 13 mm	
<b>Peso:</b> 20 g	



# VAJILLA ORNAMIN

## Serie 500 / KLASSIK

### Modelo 808. Tapa pistero efecto vacío (polipropileno)

- Si el vaso se cae, la tapa hace que sólo se derramen unas pocas gotas, ya que está diseñada para liberar el líquido sólo al succionar.
- La apertura de succión provoca una pequeña cantidad de aire que entra en el recipiente a través de un pequeño orificio que se cierra automáticamente por una junta de goma. No se libera ningún líquido si no se succiona, lo que lo hace especialmente indicado para evitar que el líquido pase a las vías respiratorias en pacientes encamados con dificultades para coordinar la deglución.



<b>Material:</b> PP	<b>Apto para lavavajillas.</b>
<b>Ø:</b> 5 mm	<b>Apto para microondas.</b>
<b>Peso:</b> 20 g	

	806	807	808	511	512
 207	✓	✓	✓	✓	✓
 805	✓	✓	✓	✓	✓
 815	✓	✓	✓	✓	✓
 816	✓	✓	✓	✓	✓
 420				✓	✓
 501				✓	✓
 508				✓	✓

## DISPENSADORES DE MEDICAMENTOS

### Modelo 1800. Vaso para medicación 25ml (polipropileno)

<b>Material:</b> PP	<b>Capacidad:</b> 25 mm	<b>Apto para lavavajillas.</b>
<b>Altura:</b> 40 mm	<b>Peso:</b> 4.3 g	<b>Apto para microondas.</b>
<b>Ø:</b> 33 mm		



Modelo 1800					
	1274 Natural	2493 Azul	1275 Amarillo	1277 Verde	1276 Rojo

### Modelo 1819. Tapa para vaso de medicación (polipropileno)


<b>Material:</b> PP	<b>Apto para lavavajillas.</b>
<b>Altura:</b> 15 mm	<b>Apto para microondas.</b>
<b>Ø:</b> 33 mm	
<b>Peso:</b> 1,6 g	

Modelo 1819	
Ref:	2412 Blanco



## PISTERO RIKA

- Diseño ergonómico con formas acanaladas para asegurar la sujeción con los dedos.
- El líquido no sale sin succionar (con la tapa estrecha) lo que evita que se derrame si el pistero se cae y lo hace **especialmente indicado para evitar sofocamientos en pacientes encamados.**
- Para bebidas frías o calientes.  
2 modelos de tapa, para líquidos y para cremas, purés, yogur, etc..
- Borde redondeado para usar como vaso.
- Lavable en lavavajillas hasta 130°.
- Capacidad 250 ml, graduado a 100 y 200 ml.
- Puede usarse en microondas.
- Apilable (con la precaución de que estén secos y enfriados después del lavado).
- En plástico ABS libre de PVC, prácticamente irrompible.
- Ecológico; sus residuos no dañan el medio ambiente.
- Transparentes en 6 colores fácilmente identificables.
- Puede acoplarse un asa como opción (Ref. RT-4).

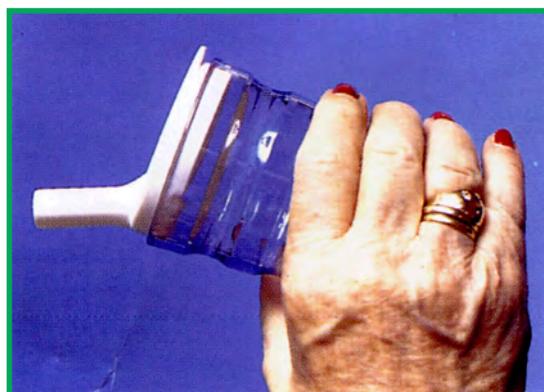

### Referencias:

- RV-S:** Pistero en ABS color humo
- RV-B:** Pistero en ABS color azul
- RV-Y:** Pistero en ABS color amarillo
- RV-P:** Pistero en ABS color Rosa
- RV-G:** Pistero en ABS color Verde
- RV-O:** Pistero en ABS color Naranja
- RV-V:** Pistero en ABS color Violeta



- RT-1:** Tapa pistero boca ancha (cremas...)
- RT-2:** Tapa boca estrecha (líquidos)
- RT-3:** Tapa térmica

## ABRIDOR DE TAPONES

- La forma más sencilla de abrir los tapones de las botellas.
- Abrir las botellas puede ser difícil, especialmente para personas con debilidad y dolor en las muñecas.
- El diseño del abridor de tapones facilita la apertura de cualquier tipo de botella.

### Referencias:

- 200-118-CAP OFF:** Abridor de tapones



UGARI GERIÁTRICA

C/Venta de la Estrella 6, pab.126 - 01006 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)  
Tel (+34) 945 146 744; Fax (+34) 945 154 036; E-mail: ugari@ugari.es

[www.ugari.es](http://www.ugari.es)

## PISTERO ENCAMADOS NOVO CUP



1. Llenar el pistero con líquido.



2. Fijar la pajita firmemente en la boquilla en la parte interior de la tapa.



3. Colocar la tapa. Si el usuario está sentado no es necesario cerrar el tapón.



4. Si el usuario está en la cama, cerrar el tapón. El líquido sólo saldrá por succión.

- El líquido no sale sin succionar (con la tapa estrecha) lo que evita que se derrame si el pistero se cae y lo hace **especialmente indicado para evitar sofocamientos en pacientes encamados**.
- Completo control del fluido, sin necesidad de incorporarse o levantar la cabeza.
- Ideal para personas con movilidad reducida en la cabeza o cuello.
- Apto para líquidos calientes y fríos.
- Transparente, contenido visible.
- Capacidad 250 ml con graduación cada 25 ml.
- Puede ser utilizado en lavavajillas, microondas y autoclave.

### Referencia:

NC: Pistero Novo Cup



## SOPORTE SANDWICH ANTIDESLIZANTE

- Diseñado con un borde redondeado que mantiene inmóvil la rebanada de pan sobre su superficie y con silicona antideslizante en la parte inferior, la tabla para sandwich puede utilizarse con una sola mano.
- Su diseño es moderno, agradable y extremadamente funcional.
- Fácil de limpiar, está disponible en dos tamaños, 13x13 cm y 16x16 cm

### Referencias:

SP: Soporte de sandwich 13x13 cm

SG: Soporte de sandwich 16x16 cm



## TAPETES ANTIDESLIZANTES



- Miles de microcavidades generan un efecto de vacío que sujeta el tapete y mantiene cualquier objeto en su sitio.
- Desde entonces, el tapete antideslizante ha ido encontrando numerosas aplicaciones en la asistencia sanitaria personal y profesional: se trata de un elemento indispensable para aquellos con una capacidad de movilidad o destreza limitadas.
- El tapete proporciona estabilidad y apoyo y da una mayor confianza a aquellos que lo emplean. No contiene látex.

### Uso

No lo emplee en superficies enceradas.  
Simplemente lávelo para restablecer su adherencia.

### Referencia:

NSU1622B: 16x22 cm azul

NSU1622R: 16x22 cm rojo

NSU2535B: 25,5x35,5 cm azul

NSU2535R: 25,5x35,5 cm rojo

UGARI GERIÁTRICA

C/Venta de la Estrella 6, pab.126 - 01006 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)  
Tel (+34) 945 146 744; Fax (+34) 945 154 036; E-mail: ugari@ugari.es

www.ugari.es

## BOTES MULTIUSOS



Para abrir:  
Presionar el  
punto señalado.

Fácil de abrir  
sin roscar  
ni girar.

Para cerrar:  
Presionar en el  
centro de la tapa.

- Para personas con dificultades en la vida diaria.
- Basta una ligera presión con el dedo, la mano o incluso el codo para abrirlos y cerrarlos.
- Aprobado para alimentos: café, azúcar, galletas, pasta, etc.
- También apropiado para cualquier clase de objetos: lápices, puzzles, etc...
- Transparentes para que el contenido sea visible.
- Utilizables entre -30° C y +95° C.
- Lavables en el lavavajillas.
- Fabricados en material plástico especial (SAN) y respetuoso con el medio ambiente.
- El set se compone de 3 botes de 750 ml, 1.350 ml y 2.000 ml.

### Referencia:

**RB:** Set tres botes multiusos

## SOPORTE BARAJA

- Especialmente diseñado para personas sin fuerza en las manos. Se pueden manejar las cartas y tener total control de las mismas sin dificultad.
- Las cartas no se superponen y pueden moverse con facilidad.
- Fabricado en aluminio y polipropileno, su peso es de sólo 300 gramos y sus medidas de 30x5 cm.



### Referencia:

**SC:** Soporte baraja

## ESCURRIDOR



- El escurridor **para trapos de cocina** permite realizar esta tarea a personas sin fuerza en las manos, con las manos doloridas o con problemas de reumatismo.
- Simplemente se coloca el trapo en el cuerpo del escurridor (dentro del fregadero) y se presiona hacia abajo con el émbolo
- Su diseño es compacto e irrompible y puede lavarse en el lavavajillas.

### Referencia:

**ES:** Escurridor de trapos

## PINZAS "UNA MANO"

- Las pinzas de colgar ropa han sido diseñadas para personas sin fuerza en las manos.
- En lugar de presionar las pinzas con los dedos, solamente se necesita presionar hacia abajo, en la dirección de la ropa.
- Están fabricadas en resina, pueden lavarse en el lavavajillas y mantienen la ropa sujeta incluso con fuerte viento.

### Referencia:

**PR:** Pinzas ropa



## FREEHAND

- FreeHand ha sido creado para satisfacer las necesidades diarias de las personas que sufren la amputación de una de sus extremidades superiores o una disfunción (temporal o permanente) de la misma.
- Desarrollado en cooperación con un equipo médico especializado en el sector ortopédico, permite cortar y comer utilizando una sola mano.



1



Tire de la pestaña

2



Freehand abierto = cuchillo

3



Presione la pestaña hacia delante

4



Freehand cerrado = tenedor

### Referencia:

E143000201: Freehand

## EXTRACTOR DE PASTILLAS



- Una forma cómoda y rápida de extraer las pastillas de sus blisters.
- Especialmente práctico en farmacias y botiquines de hospitales y residencias, donde se preparan a diario grandes volúmenes de medicación.
- También adecuado para uso domiciliario, particularmente para personas con poca fuerza o dificultades de movilidad en las manos.

### Referencia:

B8001: Extractor de pastillas

UGARI GERIÁTRICA

C/Venta de la Estrella 6, pab.126 - 01006 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN);  
Tel (+34) 945 146 744; Fax (+34) 945 154 036; E-mail: ugari@ugari.es

[www.ugari.es](http://www.ugari.es)

## PROTECTOR DE ESCAYOLA BLOCCS



Protector brazo largo



Protector pierna corta



Protector brazo corto

### Descripción:

- BLOCCS es un protector de escayolas y vendajes **TOTALMENTE ESTANCO** adecuado para la ducha, el baño, la **playa y la piscina**.
- Fabricado en látex de caucho natural, es suave, flexible y fácil de llevar. Es reutilizable y estanco sin cierres ni velcros.
- **BLOCCS PUEDE USARSE EN LA PLAYA Y EN LA PISCINA.**
- Para mayor comodidad se puede colocar doblándolo sobre sí mismo hasta la mitad (como un calcetín), introduciendo el pie o la mano y deslizado la mitad plegada hasta que quede estirado.
- **Los protectores de codo están especialmente indicados para cubrir pics y vendajes de codo dejando libre la mano.**



Protector codo

### Limpieza:

El protector se puede lavar tanto en agua caliente como fría y debe ser secado por ambas caras. interior y exterior.

### Propiedades:

- Impermeable
- Ajustable



Protector rodilla

### Referencias:

**P6370:** Brazo corto adulto  
**P6371/S:** Brazo corto niño (1-3 años)  
**P6371/M:** Brazo corto niño (4-9 años)  
**P6371/L:** Brazo corto niño (10-14 años)

**P6372C:** Brazo largo adulto  
**P6373/XS:** Brazo largo niño (1-3 años)  
**P6373/S:** Brazo largo niño (4-7 años)  
**P6373/M:** Brazo largo niño (8-10 años)  
**P6373/L:** Brazo largo niño (11-14 años)

**P6374:** Pierna corto adulto  
**P6375/S:** Pierna corto niño (1-3 años)  
**P6375/M:** Pierna corto niño (4-9 años)  
**P6375/L:** Pierna corto niño (10-14 años)

**P6376:** Pierna largo adulto  
**P6377/S:** Pierna largo niño (1-3 años)  
**P6377/M:** Pierna largo niño (4-9 años)  
**P6377/L:** Pierna largo niño (10-14 años)

**P6386/S:** Codo adulto (Talla S)  
**P6386/M:** Codo adulto (Talla M)  
**P6386/L:** Codo adulto (Talla L)  
**P6385/XS:** Codo niño (1-3 años)  
**P6385/S:** Codo niño (4-7 años)  
**P6385/M:** Codo niño (8-10 años)  
**P6385/L:** Codo niño (11-14 años)

**P6387/S:** Rodilla adulto (Talla S)  
**P6387/M:** Rodilla adulto (Talla M)  
**P6387/L:** Rodilla adulto (Talla L)  
**P6387/XL:** Rodilla adulto (Talla XL)



UGARI GERIÁTRICA

C/Venta de la Estrella 6, pab.126 - 01006 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN);  
 Tel (+34) 945 146 744; Fax (+34) 945 154 036; E-mail: ugari@ugari.es

[www.ugari.es](http://www.ugari.es)

## BASTÓN BASCULANTE "SWING"



### Descripción:

- El bastón basculante "Swing" se mantiene verticalmente sin necesidad de sujetarlo. Gracias a su función basculante se mantiene de pie incluso ante leves oscilaciones.
- Si el bastón está en el suelo, se puede colocar verticalmente sin necesidad de agacharse. Pisando la parte inferior del bastón ligeramente con el pie, el bastón se inclina hasta la posición vertical.
- El cuerpo del bastón está fabricado en aluminio, que debido a su bajo peso proporciona ligereza al conjunto.
- La base del bastón tiene una gran resistencia y es fácilmente reemplazable.
- Ajuste en altura telescópico, continuo, sin intervalos.
- Empuñadura anatómica.
- Un año de garantía.
- Fabricado en Europa.

### Características técnicas:

Altura ajustable:	75 - 92,5 cm
Peso total:	490 g.
Peso usuario:	100 Kg.
Empuñadura:	Fibra de vidrio & plástico



### Referencias:

- 3760262850023:** Bastón basculante Beige  
**3760262850030:** Bastón basculante Magenta  
**3760262850016:** Bastón basculante Cacao

# ALFOMBRILLA ANTIDESLIZANTE

## Alfombrilla antideslizante ETAC

- Una ayuda para la correcta colocación del paciente en sillas y butacas.
- Diseñada para permitir el deslizamiento en una sola dirección.
- Permite al paciente deslizarse fácilmente para quedar incorporado en una cama o silla, pero sin resbalar hacia delante de nuevo.

### **Aplicaciones:**

Se puede utilizar en todo tipo de sillas de ruedas, sillas, butacas, sofás y también camas, para incorporarse y no volver a resbalar.

### **Especificaciones técnicas:**

- Interior: Paneles centrales de Nylon de fricción baja  
2 tiras de tejido deslizante/ antideslizante tipo "piel de foca".
- Exterior: Cubierta antideslizante con la mayor parte de materiales (ropa, tapicerías etc...)

### **Lavado:**

Puede ser lavado a máquina a 60°C.



### **Referencias:**



**IM39/8:** Alfombrilla deslizante / antideslizante 37x43 cm

**IM37/8:** Alfombrilla deslizante / antideslizante 60x80 cm

## DISCOS GIRATORIOS

### Discos giratorios ETAC

- El disco giratorio es una ayuda para facilitar las transferencias de los pacientes. Un paciente con fuerza en los brazos puede moverse sin ayuda de otra persona desde sillas de ruedas hasta otra silla, servicio, cama, etc..
- En caso contrario se precisará la ayuda de otra persona en combinación con el **Cinturón Transfer Ref: ATV-025**.
- El disco giratorio está fabricado con materiales flexibles, pesa muy poco, gira muy fácilmente y puede doblarse para guardarlo o transportarlo.
- Se puede limpiar con un trapo húmedo.
- Diámetro 40 cm aprox.
- Consta de dos discos idénticos, conectados en el centro con un mecanismo giratorio de material plástico. Los discos no deben ser separados.
- Sus caras interiores son super-deslizantes, y las exteriores totalmente anti-deslizantes, tanto con el suelo como con calcetines o zapatos.
- Con su uso las articulaciones de rodillas y tobillos del paciente no se torsionan al efectuar una transferencia, por lo que le resulta mucho más fácil mantener la estabilidad, al tiempo que reduce drásticamente el esfuerzo del personal auxiliar, especialmente si se usa en combinación con el Cinturón Transfer (ref. ATV-025), como se muestra en la fotografía.

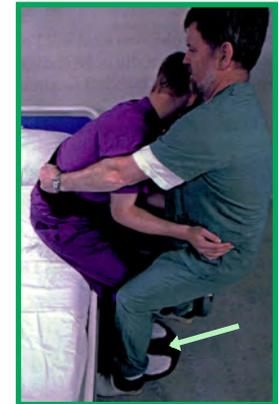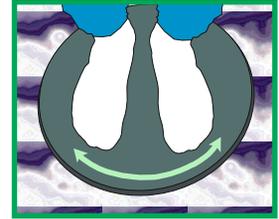

#### Referencias:

- IM99836GT:** Disco giratorio para transferencias.  
**IM999405:** Disco giratorio para asiento, diámetro 40 cm

### Disco giratorio rígido All Mobility

- El disco giratorio y rígido de All Mobility facilita las transferencias de usuarios en sillas de ruedas o con problemas con las articulaciones inferiores.
- Para traslados desde sillas de ruedas a la cama, desde sillones, sillas e inodoros a sillas de ruedas o viceversa.
- La parte inferior tiene unas gomas antideslizantes que evitan el deslizamiento cuando se realiza la transferencia.



#### Referencias:

- TRDISGIR:** Disco de transferencias rígido All Mobility

## TABLA DE TRANSFERENCIAS "BUFFALO 150"



### Descripción:

- Tabla de fibra sintética con superficie deslizante para facilitar las transferencias del usuario.
- Fácilmente transportable, tiene un espesor de sólo 4 milímetros, y un asidero integrado.
- La tabla Buffalo 150 cuenta con una doble hendidura que pueden ser insertadas en las patas de las sillas para ofrecer una mayor estabilidad y garantizar la máxima seguridad durante la transferencia.
- Su fabricación en fibra compuesta asegura elevada resistencia y permite evitar las astillas y desgastes superficiales que se crean con el tiempo con otros materiales.
- La tabla Buffalo aguanta hasta 150 kg distribuidos por toda la superficie de la tabla.
- Certificado CE, dispositivo médico de clase I, fabricado en Europa.

La tabla Buffalo 150 constituye una ayuda caracterizada por su ductibilidad y versatilidad de uso.



En el exterior la tabla es fácilmente transportable gracias a sus dimensiones y al peso reducidos, se puede emplear para transferencias en el automóvil (entrada y salida del vehículo) o en bancos, sillas, sofás y lugares públicos.



Puede ser empleada fácilmente para pequeñas transferencias en interiores, por ejemplo dormitorio, sala, cocina o baño; para transferencias de la silla de ruedas a sofá, cama, silla o WC (y viceversa).



### Características técnicas:

Longitud:	77 cm
Anchura:	32 cm
Grosor:	0.4 cm
Peso tabla:	1.23 Kg
Peso max. usuario:	150 Kg

### Referencias:

**ALL 03:** Tabla de transferencias Buffalo 150.

**ADESIGRIP2:** Antideslizante para la tabla de transferencias Buffalo 150 (par).

UGARI GERIÁTRICA

C/Venta de la Estrella 6, pab.126 - 01006 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN);  
Tel (+34) 945 146 744; Fax (+34) 945 154 036; E-mail: ugari@ugari.es

[www.ugari.es](http://www.ugari.es)

---

# SÁBANAS MULTIDESLIZANTES “ERGOMOVE”

## Sábanas multideslizantes HyperglideToo

### Descripción:

- La HyperGlideToo es una sábana multideslizante doble, de forma tubular, perfecta para desplazar y cambiar de postura a los pacientes de forma cómoda y segura en la cama sin que sea necesario levantarlos.

La HyperGlideToo tiene un índice de fricción extremadamente bajo que facilita el deslizamiento.

- Fabricado 100% en poliamida. Es muy resistente, agradable al tacto y flexibilidad excepcionales. Capacidad deslizante por ambas caras.



### Referencia:

- TLT7070:** Sábana multideslizante HyperglideToo 70 cm x 70 cm
- TLT10070:** Sábana multideslizante HyperglideToo 100 cm x 70 cm
- TLT70100:** Sábana multideslizante HyperglideToo 70 cm x 100 cm
- TLT100100:** Sábana multideslizante HyperglideToo 100 cm x 100 cm
- TLT13090:** Sábana multideslizante HyperglideToo 130 cm x 90 cm

---

## Sábana multideslizante 4WaySheet

### Descripción:

- La 4WaySheet® es una sábana deslizante de una sola capa que es utilizada por uno o más cuidadores para cambiar de postura a los pacientes en la cama de manera segura y cómoda. Es adecuada para elevaciones, traslados o cambios de postura.
- La cara superior de la 4WaySheet es de baja fricción mientras que la cara inferior es antideslizante.
- Es impermeable.
- La 4WaySheet está pensada para su uso debajo de la sábana.
- Está fabricada en poliamida y silicona.  
La cara superior deslizante y la cara inferior antideslizante.



### Referencia:

- 4WS:** Sábana multideslizante 4WaySheet 140 x 90 cm

## ASIENTO MULTIDESLIZANTE “AutoGlide”



### Descripción:

- El asiento multideslizante AutoGlide® es el elemento ideal para entrar y salir de un automóvil. Está dirigido especialmente a personas que tienen dificultades a la hora de sentarse en el asiento.
- El AutoGlide les permite deslizarse desde el borde del asiento hacia el centro, y posicionarse de forma correcta en el asiento.
- Se compone de 2 partes que se deslizan una sobre la otra. El conjunto está fijado, mediante una correa, a la parte posterior del asiento del coche. El AutoGlide tiene 2 asas laterales para que el acompañante pueda tirar y facilitar así el traslado.
- El AutoGlide está fabricado en tejido transpirable que proporciona gran comodidad, en trayectos largos.

### Referencia:

**AG:** Asiento multideslizante AutoGlide 46 x 40 cm

# ENTRENADOR DE MARCHA

## Entrenador de Marcha ROPOX

- El Entrenador de Marcha Todo-en-Uno es único. La grúa Todo-en-Una proporciona la estructura básica que permite que el entrenador de Marcha se pueda convertir en una grúa estándar o bipedestación sin necesidad de herramientas. El diseño de la horquilla permite al usuario ver a través de la estructura mientras está andando y el soporte de manos aporta seguridad a la actividad. La cincha permite realizar la elevación y la marcha del usuario.

### Ventajas:

- El paciente puede elevarse desde la silla.
- Se puede ajustar la altura al paciente.
- Colocación cómoda y segura de la cincha.
- Estabilidad desde 4 puntos.
- Alivia del peso al usuario.
- Muy buena maniobrabilidad.
- Previene las caídas del usuario.
- Puede pasar a través de las puertas.
- La terapia puede ser realizada por una sola persona.
- Evita que el usuario se resbale durante la elevación.



### Referencias:

- 25-20035:** Entrenador de Marcha "Walking Trainer" 150 kg
- 25-20526:** Entrenador de Marcha "Walking Trainer" 200 kg
- 25-20135:** Kit de conversión Entrenador de Marcha "Walking Trainer"

\*\*Para ver las cinchas del entrenador de marcha ver apartado Cinchas Ropox en la página

## GRÚA “TODO-EN-UNA” ROPOX

- La grúa “Todo en Una” puede hacer las funciones tanto de una grúa de elevación como de bipedestación.
- La grúa incluye dos perchas intercambiables, que mediante un sencillo procedimiento y sin necesidad de herramientas posibilita el cambio de grúa de elevación a grúa bipedestación o viceversa en menos de 1 minuto.
- La grúa de elevación es de manejo sencillo y tiene una gran amplitud para realizar las elevaciones.
- Su rango de altura desde la posición más alta a la más baja es de 120 cm, facilitando así las elevaciones desde el suelo a las camas más altas.
- En el modo de bipedestación la elevación es agradable para el paciente, que no siente apenas presión bajo los brazos.
- El montaje de la batería es muy fácil.
- El cargador está integrado en la caja de control. Para recargarlo, únicamente hay que enchufarlo a cualquier toma de corriente .



La grúa está equipada con dos sistemas de bajada de emergencia, mecánico y eléctrico.

Carga máxima de seguridad	150 kg	200 kg
Percha - altura máxima	180 cm	177 cm
Percha - altura mínima	55 cm	58 cm
Longitud del chasis	117 cm	122 cm
Altura patas	12 cm	12 cm
Ancho patas cerradas	65 cm	69 cm
Ancho patas abiertas	109 cm	133 cm
Ruedas frontales	7,5 cm	7,5 cm
Ruedas traseras con freno	10 cm	10 cm
Peso caja de baterías	3 kg	3 kg
Peso total	51 kg	54,3 kg
Nº elevaciones por carga	60	30

### Referencias:

**25-20020:** Grúa “Todo-en-Una” 150 kg  
**25-20520:** Grúa “Todo-en-Una” 200 kg

### Accesorios:

**25-20135:** Kit de conversión Entrenador de marcha  
**25-97260:** Protección acolchada para percha  
**25-29950:** Cargador de pared para batería. Incluye batería  
**25-29030:** Batería

UGARI GERIÁTRICA

C/Venta de la Estrella 6, pob.126 - 01006 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)  
 Tel (+34) 945 146 744; Fax (+34) 945 154 036; E-mail: ugari@ugari.es

[www.ugari.es](http://www.ugari.es)

# GRÚAS ROPOX

## Grúa Estándar ROPOX

- La grúa estándar de Ropox es de manejo muy sencillo y tiene un amplio rango de elevación para realizar las elevaciones desde el suelo a las camas más altas.
- La cincha especial Domino Higiene proporciona un excelente soporte al paciente, al mismo tiempo que facilita la higiene del mismo.
- La grúa tiene un radio de giro muy reducido, ya que la longitud del chasis es de sólo 117cm.
- La grúa incorpora varios sistemas de seguridad únicos. Ej: La grúa se detendrá si encuentra algún obstáculo en la bajada.
- La grúa está equipada con apertura de patas eléctrica y la altura del chasis es de 12 cm y facilita la colocación de las patas bajo la cama.

### Referencias:

- 25-20040:** Grúa estándar no convertible 150 kg  
**25-20010:** Grúa estándar convertible 150 kg  
**25-20524:** Grúa estándar no convertible 200 kg  
**25-20521:** Grúa estándar convertible 200 kg

### Accesorios:

- 25-20135:** Kit de conversión Entrenador de marcha  
**25-97260:** Protección acolchada para percha  
**25-29950:** Cargador de pared para batería. Incluye batería  
**25-29030:** Batería



## Grúa Bipedestación ROPOX

- Con la grúa bipedestación de Ropox el usuario se convierte en una parte activa del proceso de elevación durante el cual, es trasladado de forma digna.
- El traslado de sentado a sentado se realiza sin esfuerzo para el cuidador y de forma cómoda para el usuario. Además permite un acceso sin obstáculos a la ropa del usuario para el aseo y cambio de pañales.
- El soporte de rodillas está diseñado anatómicamente, y puede ser ajustado vertical y horizontalmente. Ello significa que siempre se consigue el ajuste correcto para cualquier usuario.
- La elevación es agradable para el paciente y no siente apenas presión bajo los brazos.
- La grúa tiene un radio de giro muy reducido, ya que la longitud del chasis es de sólo 117 cm.
- La grúa incorpora varios sistemas de seguridad únicos. Ej: La grúa se detendrá si encuentra algún obstáculo en la bajada.
- La grúa está equipada con apertura de patas eléctrica y la altura del chasis es de 12 cm y facilita la colocación de las patas bajo la cama.

### Referencias:

- 25-20050:** Grúa bipedestación no convertible 150 kg  
**25-20030:** Grúa bipedestación convertible 150 kg  
**25-20525:** Grúa bipedestación no convertible 200 kg  
**25-20523:** Grúa bipedestación convertible 200 kg

### Accesorios:

- 25-20135:** Kit de conversión Entrenador de marcha  
**25-97260:** Protección acolchada para percha  
**25-29950:** Cargador de pared para batería. Incl. batería  
**25-29030:** Batería



## CINCHAS ROPOX

### Domino Combi

- Está diseñada como la cincha Activa, pero cuenta con una sujeción extra en la cabeza. Se puede utilizar junto con el cinturón de seguridad como un accesorio.

#### Referencias:

- 25-49031:** Cincha Domino Combi S. Uso opcional del soporte de cabeza
- 25-49032:** Cincha Domino Combi M. Uso opcional del soporte de cabeza
- 25-49033:** Cincha Domino Combi L. Uso opcional del soporte de cabeza



### Domino Classic

- Se aconseja para personas con poco control sobre su cabeza y cuerpo. Apropia para levantar desde una posición tumbada. Sujeta todo el cuerpo. Refuerzo acolchado en piernas, cabeza, y cuerpo para mayor comodidad.

#### Referencias:

- 25-49011:** Cincha Domino Classic S. Con soporte acolchado de piernas
- 25-49012:** Cincha Domino Classic M. Con soporte acolchado de piernas
- 25-49013:** Cincha Domino Classic L. Con soporte acolchado de piernas
- 25-49014:** Cincha Domino Classic XL. Con soporte acolchado de piernas



### Dolphing Classic

- Adecuada para personas con poco control sobre su cabeza y cuerpo. Permite elevar personas en posición tumbada. Soporta todo el peso del cuerpo. Las cinchas Dolphing están fabricadas en rejilla de poliéster blanco para su uso en baños. El agua puede pasar fácilmente a través de ella. Fácil de lavar.

#### Referencias:

- 25-41011:** Cincha Dolphing Classic S. Con soporte acolchado piernas
- 25-41012:** Cincha Dolphing Classic M. Con soporte acolchado piernas
- 25-41013:** Cincha Dolphing Classic L. Con soporte acolchado piernas
- 25-41014:** Cincha Dolphing Classic XL. Con soporte acolchado piernas



### Domino Amputación

- El diseño especial de sus correas provee una óptima sujeción y balanceo. Se puede utilizar junto con el cinturón de seguridad como un accesorio.

#### Referencias:

- 25-48031:** Cincha Domino Amputación S
- 25-48032:** Cincha Domino Amputación M
- 25-48033:** Cincha Domino Amputación L



#### Accesorios:



Para cinchas ACTIVE, COMBI, AMPUTACIÓN, el uso de cinturones de seguridad ofrece al usuario una sensación de seguridad extra. Pueden ser fijados fácilmente a las cinchas.

#### Referencias:

- 25-49111:** Cinturón de seguridad S
- 25-49112:** Cinturón de seguridad M
- 25-49113:** Cinturón de seguridad L

UGARI GERIÁTRICA

C/Venta de la Estrella ó, pab.126 - 01006 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)  
Tel (+34) 945 146 744; Fax (+34) 945 154 036; E-mail: ugari@ugari.es

[www.ugari.es](http://www.ugari.es)

## CINCHAS ROPOX

- Las cinchas Domino están fabricadas utilizando un material especial de poliéster, que auna confort con una increíble resistencia.
- El material tiene un acabado pulido en su interior. Esto proporciona a la cincha una superficie con un tacto similar al algodón, lo que resulta confortable para el usuario pero al mismo tiempo no permite que éste se deslice por la cincha. El material es retardante al fuego.

### Domino Thorax

- Sólo para grúa bipedestación. Diseño y sujeción exclusivos. Proporciona un óptimo soporte para bipedestación. Puede también ser suministrado con refuerzo acolchado bajo los brazos.

#### Referencias:

<b>25-48011:</b> Cincha Domino Thorax S	<b>25-43011:</b> Cin. Domino Thorax acolchada S
<b>25-48012:</b> Cincha Domino Thorax M	<b>25-43012:</b> Cin. Domino Thorax acolchada M
<b>25-48013:</b> Cincha Domino Thorax L	<b>25-43013:</b> Cin. Domino Thorax acolchada L
<b>25-48014:</b> Cincha Domino Thorax XL	<b>25-43014:</b> Cin. Domino Thorax acolchada XL
	<b>25-43015:</b> Cin. Domino Thorax acolchada XXL



### Domino Higiene

- Incluye cinturón de seguridad. Se aconseja para trasladar personas en posición sentada. Es aconsejable para el uso en baños.

#### Referencias:

<b>25-48021:</b> Cincha Domino Higiene S (cintura max. 70 cm)
<b>25-48022:</b> Cincha Domino Higiene M (cintura max. 110 cm)
<b>25-48023:</b> Cincha Domino Higiene L (cintura max. 125 cm)
<b>25-48024:</b> Cincha Domino Higiene XL (cintura max. 150 cm)
<b>25-48025:</b> Cincha Domino Higiene XXL (cintura max. 170 cm)



### Dolphing Higiene

- Las cinchas Dolphing están fabricadas en rejilla de poliéster blanco para su uso en baños. El agua puede pasar fácilmente a través de ella. Fácil de lavar. Incluye cinturón de seguridad. Apropia para higiene y baño. Adecuada para transferir personas en posición sentada.

#### Referencias:

<b>25-42021:</b> Cincha Dolphing Higiene S (cintura max. 70 cm)
<b>25-42022:</b> Cincha Dolphing Higiene M (cintura max. 110 cm)
<b>25-42023:</b> Cincha Dolphing Higiene L (cintura max. 125 cm)
<b>25-42024:</b> Cincha Dolphing Higiene XL (cintura max. 150 cm)



### Domino Activa

- Sujeta el cuerpo hasta la altura de los hombros. Fácil de usar, ya que la pierna y la espalda están protegidas por un material especialmente acolchado. Se puede utilizar junto con el cinturón de seguridad como un accesorio.

#### Referencias:

<b>25-48041:</b> Cincha Domino Activa S
<b>25-48042:</b> Cincha Domino Activa M
<b>25-48043:</b> Cincha Domino Activa L



## CONTENEDOR DE PAÑALES SANGENIC



### Descripción:

- Discretos, higiénicos y de uso sencillo, los contenedores Sengenic ayudan a mantener un entorno agradable y libre de olores en residencias, recintos hospitalarios y domicilios.
- Desde el momento en que entren en su residencia, los residentes y sus familiares sabrán que disponen del más alto nivel de atención e higiene.
- Sengenic es el único sistema de recogida de pañales y residuos sanitarios libre de olores y gérmenes.
- Elimina los olores con un simple movimiento de giro y sellado.
- El contenedor maxi tiene una capacidad aproximada de 22 pañales adulto (según tamaño) y está indicado para su uso en baños o salas donde se realicen varios cambios de pañales. Su altura es de 89 cm.
- El cartucho de recambio contiene 22,5 metros de bolsa perfumada con tratamiento antibacteriano que sirve aproximadamente para contener entre 75 y 100 pañales(según tamaño).

### Accesorios:

Carro con ruedas para Contenedor Sengenic Maxi.

### Referencias:

**854342:** Contenedor Sengenic Maxi

**854338:** Cartucho de recambio Sengenic

**854-C:** Carro con ruedas para Contenedor Sengenic Maxi

# INSTRUCCIONES DE USO CONTENEDOR DE PAÑALES SANGENIC



En su primer uso extraiga la suficiente cantidad de bolsa antibacteriana



Haga un nudo y apriételo fuertemente



Inserte el nudo en el contenedor



Empuje el pañal doblado a través de la boca del contenedor



Asegúrese de que el pañal queda bien sujeto entre las pinzas de sujeción interiores



Girar 2 o 3 veces hasta que quede perfectamente estanco el orificio



Vuelva a introducir otro pañal y proceda de la misma forma



Una vez el contenedor se haya llenado, proceda a girar la boca del contenedor 6 ó 7 veces para que la bolsa antibacteriana quede suficientemente tensa



Cierre la tapa



Gire el mecanismo de la cuchilla hasta que corte la bolsa. Abra la tapa y empujar el pañal al fondo del contenedor



Retirar la cabeza del contenedor y sacar el contenido. Es posible utilizar una bolsa de basura para facilitar la recogida.

UGARI GERIÁTRICA

C/Venta de la Estrella 6, pab.126 - 01006 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN);  
Tel (+34) 945 146 744; Fax (+34) 945 154 036; E-mail: ugari@ugari.es

[www.ugari.es](http://www.ugari.es)